

АЛТ (аланинаминотрансфераза)

IFCC, without P5P (метод без перидоксальфосфата)

Параметры для ввода в программу анализатора: Торус 1210; VitaLine 200.

ПАРАМЕТРЫ Stormoff®

Пользователь: []

Параметры теста | Профили | Последовательность проведения тестов | Вычисляемые тесты | Внешние тесты | Рефлекс тесты

Тест: АЛТ | Код теста: ###*

Основные параметры | Нормальные величины | Калибровка

Метод: Кинетика | Кинетика тип А | Уменьшение | Substrate depleted Limit: 0,6

Основной фильтр: 340 | Дополнительный фильтр: 546 | Ед.изм.: Ед/л | Кол.зн.посл.зпт: 1

Объем R1 (мкл)	МЕСТО R1	Время инкубации (с)	Объем флакс
200	21*	144	18

Объем R2 (мкл)	МЕСТО R2	Время инкубации (с)	Объем флакс
50	20*	60	5

Объем образц (мкл): 20 | Время считыв.(с): 180 | рость врац. микс: Нормальн

Произв.реар.: Diasys | Лизирующий р:

Информация о реагенте R1		Информация о реагенте R2	
Номер лота	###*	Номер лота	
Штрихкод R1		Штрихкод R2	
Срок годности	гггг-мм-дд*	Срок годности	
действительно дн		действительно дн	

Номер лота: [] | Штрихкод реагента: []

Диапазон ре: 0.0000 | 0.0000 | 0.3450 | Лин.диап.: 600

Добавить | Удалить | Сохранить | Печать предв.просмотр | Печать | Импорт | Экспорт

АЛТ (аланинаминотрансфераза)

IFCC, without P5P (метод без перидоксальфосфата)

ПАРАМЕТРЫ Stormoff®

Пользователь: ПАРАМЕТРЫ

Панель инструментов: Параметры теста | Профили | Последовательность проведения тестов | Вычисляемые тесты | Внешние тесты | Рефлекс тесты

Тест: АЛТ | Код теста: ##

Тест	Код теста
TP	5
GLU	7
CHOL	8
TBIL	9
DBIL	10
UA	11
Ca	12
Fe	13
CRE	14
UREA	15
AST	16
ALT	17
AMY	18
ALP	19
Amy.urea	21
TrUr	22

Полное название: АЛТ | Тест: ALT | Код теста: ##

Калибровка: Основные параметры | Нормальные величины | Калибровка

Количество стандартов: 2 | Тип калибровки: По двум точкам

Позиция стандарт	Концентрация стандарт	Оптич. плотность
1	39**	***
2	40**	0.0
3		
4		
5		
6		

График: Оптическая плотность vs. Концентрация стандарт (0-35)

История калибровки: Редакт. OD. | Ист. калибр.

Тип пробирки: cup | № лота калибр.: 25881* | Срок годности: 2021-07-10* | Номер лота

Кнопки: Добавить | Удалить | Сохранить | Печать предв. просмотр | Печать | Импорт | Экспорт

* Выбирается пользователем.

** -Вводится из паспорта к калибратору

*** -Рассчитывается анализатором

Тип калибровки: линейная, калибратор TruCal U или по фактору. Контроль по TruLab N и TruLab P.