


## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

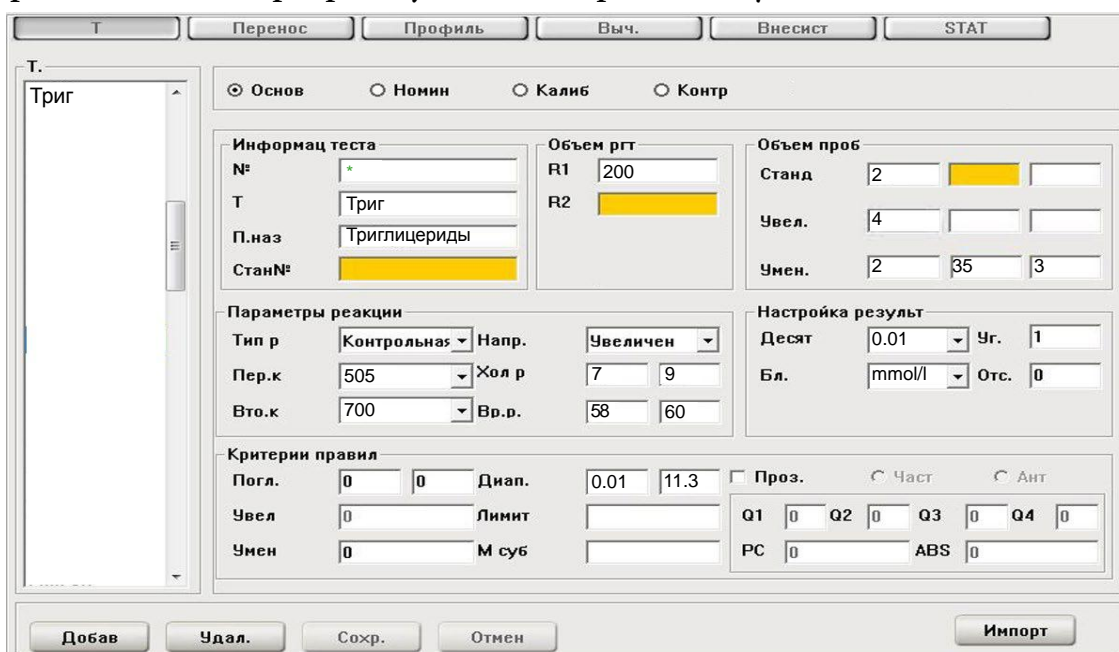

Т. Триг

Основ Номин Калиб Контр

**Информац теста**  
 №: \*  
 Т: Триг  
 П.наз: Триглицериды  
 Стан№: \*

**Объем ргг**  
 R1: 200  
 R2: \*

**Объем проб**  
 Станд: 2  
 Увел.: 4  
 Умен.: 2 35 3

**Параметры реакции**  
 Тип р: Контрольная Напр.: Увеличен  
 Пер.к: 505 Хол р: 7 9  
 Вто.к: 700 Вр.р.: 58 60

**Настройка результат**  
 Десят: 0.01 Уг.: 1  
 Бл.: mmol/l Отс.: 0

**Критерии правил**  
 Погл.: 0 0 Диап.: 0.01 11.3  
 Увел.: 0 Лимит:  
 Умен.: 0 М суб:


Проз. Част. Ант.  
 Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0  
 PC: 0 ABS: 0

Добав Удал. Сохр. Отмен Импорт

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

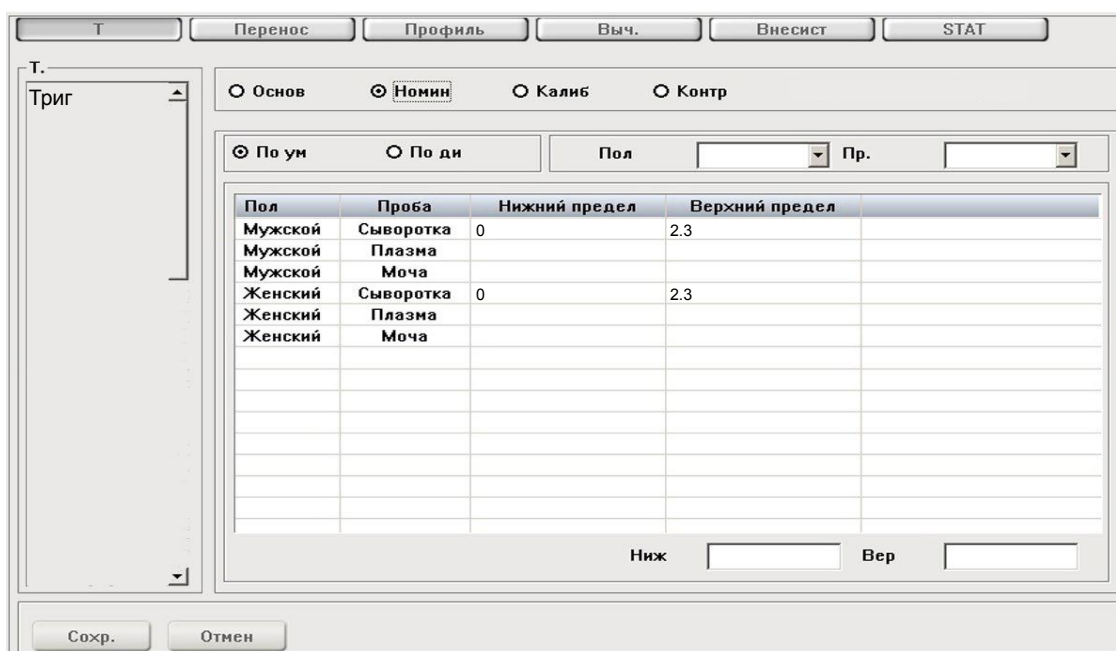

Т. Триг

Основ **Номин** Калиб Контр


По ум По дн Пол: Пр.:  

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0	2.3
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0	2.3
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

 Ниж: Вер:

Сохр. Отмен

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

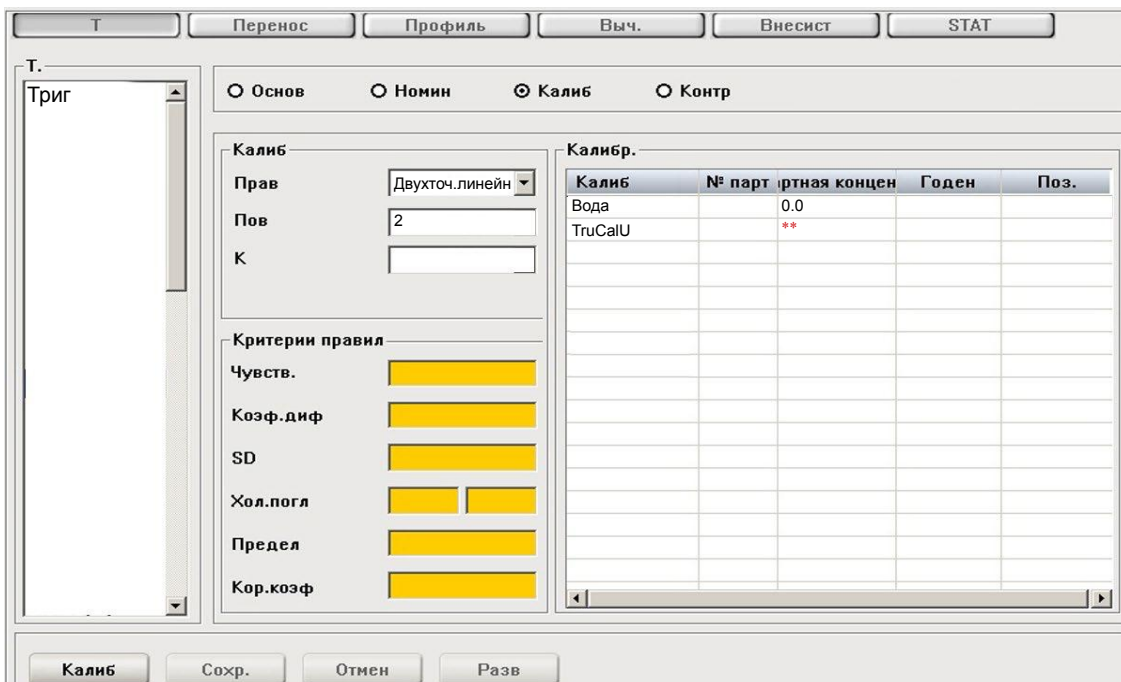

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
Вода		0.0		
TruCalU		**		

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или стандарту из набора.  
Контроль по TruLab N и TruLab P.