

# Комплемент С4

ИтипоTD (Иммунотурбодиметрический)



## Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab

Определение теста

Thermo SCIENTIFIC C4

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Тип теста: Фотометрический

Тест в работе: ДА

Полное имя: С4-комплимент

Сетевое имя: \*

Границы: г/л

Кол-во знаков: 3

Подтверждение: Автомат.

Разведение 1 +: 0

Тип образца:  
 Сыворотка  Плазма  Моча  
 СМЖ  Другие

Дата коррекции

Предель тест: 0 2.7 г/л

Начальн. абс: 0 3.000 А

Предель разв-я: + 0.9 г/л

Вторич раз-е 1 +: 0.0 2

Гран.норм	Мин	Макс	Ед.	В работе
Жен	0.1	0.4	г/л	ДА
Муж	0.1	0.4	г/л	ДА

Гран.норм Мин Макс В работе

Коррекция фактора: 1

Коррекция смещ.: 0 мг/дл Далее >>

F1 Новый тест F2 Сохранить F3 Отменить F4 Выбор теста F5 Калибр. парам. F6 КК парам. F7 Тест дозир. F8 --далее--

\* Сетевое имя вводится в соответствии с настройками LIS/HIS. Если передача данных не требуется, поле можно оставить пустым.

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя. При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности методов ведены в этих же единицах.

Дозировка

Thermo SCIENTIFIC C4

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Фон: Да

Избыток антиг.: НЕТ Кювета обычная

Дозируемый объем

Реактив	Образец	Инкубация	Кон.точка	Реактив	Инкубация	Кон.точка
Реактив: C4D_1 Объем (мкл): 105	Объем (мкл): 3	Время (сек.): 180	Фон	Реактив: C4D_2 Объем (мкл): 21	Время (сек.): 300	Длина волны (нм): 340 nm Дополн. длина: *
Диспенсир. с: Экстра Объем (мкл): 10	Диспенсир. с: Экстра Объем (мкл): 8		Ответ мин. (А): * Ответ макс. (А): 0.8	Диспенсир. с: Экстра Объем (мкл): 8		Тип измерения: Норм.
Моющий раствор: [Нет]	Разбавл-е с: Вода			Моющий раствор: [Нет]		

F1 F2 Сохранить F3 Отменить F4 Выбор теста F5 Тесты F6 Предварит этап F7 Стереть следующие F8

# Комплемент С4

ИтипоTD (Иммунотурбодиметрический)



## Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab

Параметры калибровки

Thermo SCIENTIFIC C4

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Тип калибровки	Нелинейный	Фактор		Смещение																							
Повтор через (д)	0	Абс. ошибка (мА)	*	Использ. корр.	НЕТ																						
Точки/Калибр.	Двойная	Относит. ошибка (%)	*	Коррекция смещ. время повт. (дд:чч)																							
Подтверждение	Ручной	Предел абс-ции (мА)		Предел смещения (мА)																							
Направление кривой	Нарастание	Мин	*	Общее количество																							
Тип калибр.	Одиночный	Макс	*	Увеличенный																							
Калибраторы		<table border="1"><thead><tr><th>Стандарт</th><th>Конц.</th><th>коэф. разв.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NaCl 0.9%</td><td>0</td><td>0.0</td></tr><tr><td>TcPr-1</td><td>**</td><td>0.0</td></tr><tr><td>TcPr-2</td><td>**</td><td>0.0</td></tr><tr><td>TcPr-3</td><td>**</td><td>0.0</td></tr><tr><td>TcPr-4</td><td>**</td><td>0.0</td></tr><tr><td>TcPr-5</td><td>**</td><td>0.0</td></tr></tbody></table>			Стандарт	Конц.	коэф. разв.	NaCl 0.9%	0	0.0	TcPr-1	**	0.0	TcPr-2	**	0.0	TcPr-3	**	0.0	TcPr-4	**	0.0	TcPr-5	**	0.0	Код смещения std	
Стандарт	Конц.	коэф. разв.																									
NaCl 0.9%	0	0.0																									
TcPr-1	**	0.0																									
TcPr-2	**	0.0																									
TcPr-3	**	0.0																									
TcPr-4	**	0.0																									
TcPr-5	**	0.0																									
Концентрация																											
Козф. разв. 1 +																											

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8  
Сохранить Отменить Выбор теста Тесты Калибр. КК Стандарты КК --далее--

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

**ВАЖНО!** В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак **точки** !

В данной версии адаптации в качестве разбавителя образцов используется вода. При необходимости в меню «Тест дозирование» выберите другой тип разбавителя.

\* - вводится из паспорта к калибратору (TruCal Protein). Первая точка - физраствор. Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.