

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BA-88

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная
PrAlb	<input checked="" type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК		
	Проверка	PrAlb	
	Тип реакции	конечн.точка	
	Пер	405	<input checked="" type="checkbox"/> X/п реаг.
	Втор		Направл <input type="text" value="Ув."/>
	Задерж(с)	10	Об.Аспир.(мкл) <input type="text" value="500"/>
	Время изм.(с)	6	Темп <input type="text" value="37"/>
	Блок	г/л	Десятичн. <input type="text" value="0,01"/>
	Полное имя	Преальбумин	
	<input type="button" value="Добав."/> <input type="button" value="Удал."/> <input type="button" value="Сохран."/> <input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Возв."/>		

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная
PrAlb	<input type="radio"/> Основной <input checked="" type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК		
	Эталон по умолч.	<input type="text" value="0,2"/>	--- <input type="text" value="0,4"/>
	Лин.диапазон	<input type="text" value="0,04"/>	--- <input type="text" value="1,5"/>
	АБС х/п реаг.	<input type="text"/>	--- <input type="text"/>
	Пред.поглощен.	<input type="text"/>	
	Лин.предел(%)	<input type="text"/>	
	<input type="button" value="По дифф"/>		
<input type="button" value="Добав."/> <input type="button" value="Удал."/> <input type="button" value="Сохран."/> <input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Возв."/>			

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная	
PrAlb	<input type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input checked="" type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК			
	<input type="radio"/> Коэффиц.К	<input type="text"/>		
	<input checked="" type="radio"/> Правило	Log 5P		
	Повторить	2		
	<input checked="" type="checkbox"/> S1	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S5	<input type="text" value="См.паспорт"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> S2	<input type="text" value="См.паспорт"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S6	<input type="text" value="См.паспорт"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> S3	<input type="text" value="См.паспорт"/>	<input type="checkbox"/> S7	<input type="text"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> S4	<input type="text" value="См.паспорт"/>	<input type="checkbox"/> S8	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Добав."/> <input type="button" value="Удал."/> <input type="button" value="Сохран."/> <input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Возв."/>			

**ВАЖНО** для данного теста стоит использовать X/П образца