

Мочевина

Urease-GLDH UV (уреазный-глутаматдегидрогеназный метод)



Параметры для ввода в программу анализатора Rayto SuperZ

Test Parameter Setup | Calibration Setup | Quality Control Setup | Profile Setup | Calculation Setup

Мочевина

Название: Мочевина | Ед.изм.: ммоль/л | Точность: X.XX | Нормы

Объем образца(мкл) | **Реакция**

Normal | Regun

Образец: 3 | Предв.разведение

Тип реакции: 2-точ.кинетика

Тип бланка: Нет

Точки измер.: 30 - 90 сек

Вычисление: Линейный1

Диапазон

Reag.1: 300 | Скор.перемеш.: Высокая

Лин. диапазон: 0.3 - 50

Reag.2: 75 | Скор.перемеш.: Высокая

Бланк реаг.: 0 - 0

Длины волн(нм) | Линейность | Расход субстрата

Длина волны 1: 340 | Длина волны 2: 405 | К: 1 | В: 0

По возрасту | По полу

Возраст

3 | 16 | 35 | 60 | Свыше

Male

3.2 - 7.3

0 - 0

0 - 0

0 - 0

0 - 0

Female

2.6 - 6.7

0 - 0

0 - 0

0 - 0

0 - 0

Объем образца(мкл)

Normal | Regun

Объем образца при превыш.лин.: 6 | Предв.разв.

Образец: 20 | Дилуэнт: 180

Объем образца если ниже лин.: 6

Диапазон нормальных значений указан для взрослого населения в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно