

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры анализа

Параметры | Номин.диапаз | Вычислен. | Профиль | Перенос | Внесистемные

№	Анализ: GluHK	Тип: Конеч.точка	Реакция: Восходящий
Единицы: mmol/l	Точность: 2	Перв.крив: 340	Втор.крив: 546
Об. пробы: 3	Об. R1: 240	Об. R2: 60	Лин. преде: 0
Время инк.: 15	Антиген: <input type="checkbox"/> Пров.антиг.	Ответ: Н.предел: 0	Объем проб: 0
Время р: -1 — 25	Субстрат: 0	В.предел: 0	Отношение: 0
R1 холост: Н.предел: 0	Смеш. хол.реаг.: Н.предел: 0	Линейность: Н.предел: 0,1	Полн.назв.: Глюкоза
В.предел: 0	В.предел: 0	В.предел: 28	№ печати: *

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Параметры | Номин.диапаз | Вычислен. | Профиль | Перенос | Внесистемные

Анализ: GluHK    Проба: Сыворотка    Пол: Муж.

№	Пол	Возраст		Нормальн. диапазон		Ниж.предел	Вер.предел
		Лет	Месяцев	Лет	Месяцев		
<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					3,9	6,4

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры		Нормин.диапаз		Вычислен.		Профиль		Перенос		Внесистемные																																																																		
Анализ	GluHK									Проба	Сыворотка	Пол	Жен.																																																															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Возраст</span> <span>Нормальн. диапазон</span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Пол</th> <th>Лет</th> <th>Месяцев</th> <th>Лет</th> <th>Месяцев</th> <th>Ниж.предел</th> <th>Вер.предел</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/> 1</td><td></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 2</td><td></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 3</td><td></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 4</td><td></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 5</td><td></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 6</td><td></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td><td><input type="text" value="0"/></td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>По умолчанию</td> <td colspan="4"></td> <td><input type="text" value="3,9"/></td> <td><input type="text" value="6,4"/></td> </tr> </tbody> </table>													№	Пол	Лет	Месяцев	Лет	Месяцев	Ниж.предел	Вер.предел	<input type="checkbox"/> 1		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> 2		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> 3		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> 4		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> 5		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> 6		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					<input type="text" value="3,9"/>	<input type="text" value="6,4"/>
№	Пол	Лет	Месяцев	Лет	Месяцев	Ниж.предел	Вер.предел																																																																					
<input type="checkbox"/> 1		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>																																																																					
<input type="checkbox"/> 2		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>																																																																					
<input type="checkbox"/> 3		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>																																																																					
<input type="checkbox"/> 4		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>																																																																					
<input type="checkbox"/> 5		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>																																																																					
<input type="checkbox"/> 6		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>																																																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					<input type="text" value="3,9"/>	<input type="text" value="6,4"/>																																																																					

Правило				Калибраторы				
Метод	Лин.(двухточ.)			Выбрано	Калибратор	№ партии	Годен до	Уровень
Коэфф.К	<input type="text" value="0"/>	Предел ошиб. для повт. обраб.	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TruCal U	**	**	**
Экземпляры	<input type="text" value="2"/>	Холостой ответ	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Water		2020-01-01	0
Интервал	<input type="text" value="0"/>	Предел различий	<input type="text" value="0"/>					
Чувствительность	<input type="text" value="0"/>	SD	<input type="text" value="0"/>					
Определение коэффициента	<input type="text" value="0"/>							

Выбор   
 Выбрано   
 Просрочен

**\*\***-вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).

Контроль по TruLab N и TruLab P.