

# Прямой билирубин

DCA (метод с дихлоранилином (ДХА))



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

|           |                  |   |                 |
|-----------|------------------|---|-----------------|
| Тест      | БилПр            | R1  | 160             |
| №         | *                | R2  | 40              |
| Полн.назв | Прямой билирубин | Объем проб                                | 16              |
| № станд.  |                  | R1 холост                                 |                 |
| Тип реакц | Кон.точ          | Смеш.хол.реаг                             |                 |
| Перв.крив | 546              | Диап.линейн.                              | 0 - 170         |
| Втор.крив | 700              | Предел линейн.                            |                 |
| Направл.  | Увеличен         | Предел субстр.                            |                 |
| Вр.реакц  | -1 - 19          | Козфф.                                    |                 |
| Вр.инкуб. | 14               | Комп.                                     | Наклон 1 Отс. 0 |
| Единица   | umol/L           | <input type="checkbox"/> Проверка прозоны |                 |
| Точн.     | 0.1              | q1  | q2 q3 q4        |
|           |                  | ПК  | Пог             |

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

| № | Пол | Проба   | Возраст | Низкий | Высокий |
|---|-----|---------|---------|--------|---------|
| 1 | Муж | Сыворот |         | 0      | 3.4     |
| 2 | Жен | Сыворот |         | 0      | 3.4     |
|   |     |         |         |        |         |
|   |     |         |         |        |         |
|   |     |         |         |        |         |
|   |     |         |         |        |         |
|   |     |         |         |        |         |
|   |     |         |         |        |         |
|   |     |         |         |        |         |
|   |     |         |         |        |         |

# Прямой билирубин

ДСА (метод с дихлоранилином (ДХА))

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

| Назв  | Конц. |
|---|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Вода    | 0.0   |
| <input checked="" type="checkbox"/> TruCalU | **    |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).  
Контроль по TruLab N и TruLab P.