

ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

прямой метод

Dirui CS-300B ДДС АВТО

Биохим. Параметры | Позиция Профиля | Расчетный/компенсационный пункт | Перекрест. Контаминация | Формат Отчета | ИСБ Установки | Другие Установки | Ручной ввод позиции | Настройки соединения с ЛИС

Параметры Анализа | Параметры Калибровки | Границы Параметров

Позиция Теста: ЛПВП Полное Имя Теста: ЛПВП-Холестерин Знаки после запятой: 2 Единица: ммоль/л
Метод: 2 point end Время Теста: 20 Точка: 15 29 0 0 Бланк Образца
Основ. Фильтр: 570 Дополн. Фильтр: 700 Фактор Анализатора (Y=aX+b) a = 1 b = 0 всегда разбавлять

Объем Образца

Serum

Other

Нормальный:	2.8	0	0	2.8	0	0
Снижение:	2	20	80	0	0	0
Увеличение:	6	0	0	0	0	0
ОП. Предел:	3.3			3.3		Positive Reaction
Предел Прозоны:	-3.3			-3.3		Lower Limit

Реагент

Объем

Развести Объем

Поз.

R1:	280	0	0
R2:	70	0	0

Сохранить

ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

прямой метод

Dirui CS-300B ДДС АВТО

Биохим. Параметры | Позиция Профиля | Расчетный/компенсационный пункт | Перекрест. Контаминация | Формат Отчета | ИСБ Установки | Другие Установки | Ручной ввод позиции | Настройки соединения с ЛИС

Параметры Анализа | **Параметры Калибровки** | Границы Параметров

Позиция Теста:

Методы Калибровки: Точка: Наклон:

Проверка Дискретности: ОП.

Проверка Чувствительности:

Горизонтальная Проверка Бланка: -

СТД

(1)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="S1"/>	<input type="text" value="2.8"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(2)	<input type="text" value="1.3"/>	<input type="text" value="S2"/>	<input type="text" value="2.8"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(3)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(4)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(5)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(6)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Автокалибровка

	Задержка
Бланк калибровки:	<input type="text" value="0"/> Час
Промежуток калибровки:	<input type="text" value="0"/> Час
Калибровка по 2 точкам:	<input type="text" value="0"/> Час
Калибровка многоточеч.:	<input type="text" value="0"/> Час

ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

прямой метод

Dirui CS-300B ДДС АВТО

Биохим. Параметры | Позиция Профиля | Расчетный/компенсационный пункт | Перекрест. Контаминация | Формат Отчета | ИСБ Установки | Другие Установки | Ручной ввод позиции | Настройки соединения с ЛИС

Параметры Анализа | Параметры Калибровки | Границы Параметров

Позиция Теста:

Serum

Спец. Значение:

Возраст	-Муж-	-Жен-
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> Год	<input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> Год	<input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="200"/> Год	<input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/>

Значение по умолч.:

-

Границы Линейности: -

Other

Спец. Значение:

Сыворотка	-Муж-	-Жен-
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> Год	<input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> Год	<input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="200"/> Год	<input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/>

Значение по умолч.:

-

Границы Линейности: -

Сохранить

Тип калибровки: линейная (калибратор из набора или TruCal HDL/LDL). Контроль по TruLab L (липидный) уровень 1 и уровень 2.