

Бетта-Гидроксибутират (HBUT)

Enzymatic endpoint (ферментативный метод по конечной точке)



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности	Объемы теста	Контрольные интервалы
★ Тест	: HBUT	Автоповтор
Наим. отчёта	: Бетта-Гидроксибутират	Он-лайн калибровк:
Ед.	: mmol/l	Cuvette Wash
Основная дл. волны	: 546	Всего реагентов
Тип метода	: 2POINT	★ Реагент R1
Нач. M1	: 22	★ Реагент R2
★ Нач. M2	: 61	
Дубли пробы	: 1	
Дубли контроля	: 1	
Напр-ние реакции	: Увеличение	
Предел прозоны, %	: 0	
Предел лин-сти, %	: 0	
Технич. минимум	: 0.01	
Y=aX+b	a= 1	b= 0

Задать он-лайн калибровку

DOWNLOAD TEST

UPLOAD TEST

УСТАН. АВТОПОВТОР

КОПИР. ТЕСТ

ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности	Объемы теста	Контрольные интервалы
Тест	: HBUT	
Тип пробы	: SERUM	
Объемы проб		Типы проб
★ Норм.	: 4.5 µl	Проп. развед.
Увелич.	: 9 µl	Проп. развед.
Уменьш.	: 2.3 µl	Проп. развед.
★ Объем стандарта	: 4.5 µl	
Объемы реагентов и скор. мешалки		
★ Объем R1	: 180 µl	★ Скор. мешалки R1
★ Объем R2	: 45 µl	★ Скор. мешалки R2

КОПИР. ОБЪЕМЫ

ПРОСМ. ОБЪЕМОВ

Бетта-Гидроксибутират (HBUT)

Enzymatic endpoint (ферментативный метод по конечной точке)



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробнее Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : **HBUT**

Тип пробы : **SERUM**

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	0.02 0.27
Экстр.	0 0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробнее Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : **HBUT**

Тип пробы : **SERUM**

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	0.02 0.27
Экстр.	0 0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован.

ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !