

Цистатин-С

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-800

Опред./правка химанализов

Хим.	<input type="text" value="Cys-C"/>	№ *	<input type="text"/>	Тип пробы	<input type="text" value="Сыворотка"/>
Химанализ	<input type="text" value="IT"/>			Имя для печ	<input type="text" value="Цистатин-С"/>

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Тип реакции	<input type="text" value="Фиксированное время"/>	Направление реакции	<input type="text" value="Положительный"/>									
Перв. д/в	<input type="text" value="505"/>	Втор. д/в	<input type="text"/>									
Ед.изм.	<input type="text" value="мг/л"/>	Десятич	<input type="text" value="0.01"/>									
Время хол.	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Время реакции	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="33"/>							
Об. Пробы	<input type="text" value="1.5"/>	Аспирировано	<input type="text"/>	Разбавитель	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Холост.проб						
Стандарт	<input type="text" value="1.5"/>	uL	<input type="text"/>	uL	<input type="text" value="70"/>	uL	P1	<input type="text" value="135"/>	uL	P2	<input type="text" value="45"/>	uL
Понижен.	<input type="text" value="1.5"/>	uL	<input type="text" value="35"/>	uL	<input type="text"/>	uL	P3	<input type="text"/>	uL	P4	<input type="text"/>	uL
Повышенный	<input type="text" value="3"/>	uL	<input type="text"/>	uL	<input type="text"/>	uL						

Диап.линейности	<input type="text" value="0,08"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="checkbox"/> Автоповтор				
Предел линейности	<input type="text"/>						
Поглощ.хол. P1	<input type="text" value="-34000"/>	<input type="text" value="34000"/>	Источение субстрата	<input type="text"/>			
Отклик холост.	<input type="text" value="-34000"/>	<input type="text" value="34000"/>	Смеш.хол.погл.	<input type="text" value="-34000"/>	<input type="text" value="34000"/>		
Парн.химанализ	<input type="text"/>			Вр.после открытия	<input type="text"/>	Дней	
<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	<input type="radio"/> Пров. скорости	<input type="radio"/> Внесение антигена					
Q1	<input type="text"/>	Q2	<input type="text"/>	Q3	<input type="text"/>	Q4	<input type="text"/>
PC	<input type="text"/>	ABS	<input type="text"/>				

Нормальные величины для сыворотки (плазмы):

Мужчины: 0,53-0,92

Женщины: 0,53-0,92

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 6 точек, набор стандартов TruCal Cystatin C, 5 уровней+ вода (физр-р).

Контроль по TruLab Cystatin C уровень 1 и уровень 2.