

Микроальбумин

ИттипоTD (Иммунотурбидиметрический, для определения в моче)



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-100/200

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
★ Тест	: MALB	Автоповтор	: <input type="checkbox"/>		
Наим. отчёта	: Микроальбумин	Он-лайн калиброе	: <input type="checkbox"/>		
Ед.	: mg/l	Знаки п/запятой	: 1	Cuvette Wash	: <input type="checkbox"/>
Основная дл. волны	: 405	Вспомогат.	: ----	Всего реагентов	: 2
Тип метода	: 2POINT	Тип калибровки	: 5p-logit-log	★ Реагент R1	: MALB R1
Нач. M1	: 14	Кон. M1	: 16	★ Реагент R2	: MALB R2
★ Нач. M2	: 33	★ Кон. M2	: 34		
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта	: 2		
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля	: 0		
Напр-ние реакции	: Увеличение	Предел погл.	: 0.0		
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны	: Нижн.		
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин.	: 0.0		
Технич. минимум	: 3	Технич. максимум	: 350		
Y=aX+b	a= 1	b= 0			

Задайте он-лайн калибровку

DOWNLOAD TEST

UPLOAD TEST

УСТАН. АВТОПОВТОР

КОПИР. ТЕСТ

ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
Тест	: MALB				
Тип пробы	: URINE				
Объемы проб					
★ Норм.	: 9	µl	Проп. развед.	: 1	X
Увелич.	: 18	µl	Проп. развед.	: 1	X
Уменьш.	: 4.5	µl	Проп. развед.	: 1	X
★ Объем стандарта	: 9	µl			
Объемы реагентов и скор. мешалки					
★ Объем R1	: 180	µl	★ Скор. мешалки R1	: Сред.	
★ Объем R2	: 36	µl	★ Скор. мешалки R2	: Выс.	
Типы проб					
<input type="checkbox"/> SERUM					
<input checked="" type="checkbox"/> URINE					
<input type="checkbox"/> CSF					
<input type="checkbox"/> PLASMA					
<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD					
<input type="checkbox"/> OTHER					

КОПИР. ОБЪЕМЫ

ПРОСМ. ОБЪЕМОВ

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-100/200

Подробности | Объемы теста | Контрольные интервалы

Тест : MALB
 Тип пробы : URINE
 Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)
 Категория : Муж

Контр. интервал		Типы проб	
	Нижн. предел	Верхн. предел	
★ Норм.	: 0	30	<input type="checkbox"/> SERUM <input checked="" type="checkbox"/> URINE <input type="checkbox"/> CSF <input type="checkbox"/> PLASMA <input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD <input type="checkbox"/> OTHER
Экстр.	: 0	0	

[КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ](#)
[ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ](#)

Подробности | Объемы теста | Контрольные интервалы

Тест : MALB
 Тип пробы : URINE
 Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)
 Категория : Жен

Контр. интервал		Типы проб	
	Нижн. предел	Верхн. предел	
★ Норм.	: 0	30	<input type="checkbox"/> SERUM <input checked="" type="checkbox"/> URINE <input type="checkbox"/> CSF <input type="checkbox"/> PLASMA <input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD <input type="checkbox"/> OTHER
Экстр.	: 0	0	

[КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ](#)
[ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ](#)

Тип калибровки: Логит-Лог-5Р или Слайн, 6 точек. (набор стандартов TruCal Alb U CSF, 5 уровней + вода или физраствор).

Контроль по TruLab Urine уровень 1 и уровень 2.

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !