

Амилаза панкреатическая

IFCC, Zasz, EPS-G7 (метод с использованием мальтогептазида (EPS-G7)).

Параметры для ввода в программу анализатора: Торус 1210; VitaLine 200.

Значения полей отмеченных красным шрифтом выбираются пользователем.

ПАРАМЕТРЫ Stormoff®

Параметры теста | Профили | Последовательность проведения тестов | Вычисляемые тесты | Внешние тесты | Рефлекс тесты

Тест Код теста Полное название Тест Код теста

пAmy NN

Основные параметры | Нормальные величины | Калибровка

Метод Кинетика Кинетика тип А Увеличение Substrate depleted Limit 2,5

Основной фильтр 405 элнительный фи NO Ед.изм. Ед/л Кол.зн.посл.зпт 0

Объем R1 (мкл) МЕСТО R1 Время инкубации (с) Объем флакс

200 15* 300 18

Объем R2 (мкл) МЕСТО R2 Время инкубации (с) Объем флакс

50 16* 90 5

Объем образц.(мкл) Время считыв.(с) рость врац. микс

4 150 Нормальн

Not found Not found Not found

Автоматически

Y= 1.0 X+ 0.0

Диапазон ре: 0.0000 0.0000 0.3450

Лин.диап. 2000

Произв. реаг. Diasys Лизирующий р

Информация о реагенте R1

Информация о реагенте R2

Номер лота Штрихкод R1 Срок годности эйствительно дн

Номер лота Штрихкод R2 Срок годности эйствительно дн

Номер лота Штрихкод реагента

Добавить Удалить Сохранить Печать предв.просмотр Печать Импорт Экспорт

* Выбирается пользователем.

Амилаза панкреатическая

IFCC, Zasz, EPS-G7 (метод с использованием мальтогептазида (EPS-G7)).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ПАРАМЕТРЫ

Stormoff®

Параметры тестаПрофилиПоследовательность проведения тестовВычисляемые тестыВнешние тестыРефлекс тесты

ТестКод тестаПолное названиеп-АмилазаТестpAmyКод тестаNN

Тест	Код теста
TP	5
GLU	7
CHOL	8
TBIL	9
DBIL	10
UA	11
Ca	12
Fe	13
CRE	14
UREA	15
AST	16
pAmy	NN
AMY	18
ALP	19
ALB	20
Amy.urea	21
TrUr	22

Основные параметрыНормальные величиныКалибровка

Количество стандартов:

Тип калибровки:

1	<input type="text" value="поз1"/>	<input type="text" value="0"/>	
2	<input type="text" value="поз2"/>	<input type="text" value="**"/>	
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

К =

Ист.калибр.

К =

Ист.калибр.

ДобавитьУдалитьСохранитьПечать предв.просмотрПечатьИмпортЭкспорт

** -вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: линейная (калибратор TruCal U) или по фактору. Контроль по TruLab N и TruLab P.