

Общий белок в моче

Pyrogallol red (метод с пирогалловым красным)

Параметры для ввода в программу анализатора Rayto SuperZ

Test Parameter Setup Calibration Setup Quality Control Setup Profile Setup Calculation Setup

Общ.Бел.Моч

Название Ед.изм. Точность Нормы

Объем образца(мкл)

Normal Rerun

Образец ☐ Предв.разведение

Реакция

Тип реакции

Тип бланка

Точки измер. - сек

Вычисление

Диапазон

Reag.1 Скор.перемеш.

Лин. диапазон -

☐ Reag.2 Скор.перемеш.

Бланк реаг. -

Длины волн(нм)

Длина волны 1 Длина волны 2

Линейность Расход субстрата

К В

☐ По возрасту ☐ По полу

Возраст

3 Годы

16 Годы

35 Годы

60 Годы

Свыше

Ref. Range

24 - 141

0 - 0

0 - 0

0 - 0

0 - 0

Ref. Range

0 - 0

0 - 0

0 - 0

0 - 0

0 - 0

Объем образца(мкл)

Normal Rerun

Объем образца при превыш.лин. ☐ Предв.разв.

Объем образца если ниже лин.

Диапазон нормальных значений рассчитывается для мочи с учетом её суточного объема.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно