





Тест    Профиль    Вычислен.    Внесистемные    Перенос

БилОб

Параметры    Номинал    Калибр.    Контр.кач.

Прав.    Двухточ.линейн

Чувствител    -

Повторы    2

Интервал(дн)    -

Предел разл.    -

SD    -

Холост. ответ    -

Предел ошибки    -

Определение коэф.    0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> Вода	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruCalU	**

Назв    -

Конц.    -

Разв.кал   

Выбор правила калибровки

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.