

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры анализа

Параметры	Номин.диапаз	Вычислен.	Профиль	Перенос	Внесистемные
№		Анализ	LDH	Тип	Кинетика
Единицы	У/л	Точность	0	Перв.крив	340
Об. пробы.	3	Об. R1.	240	Об. R2.	60
Время инк.	15	Антиген	<input type="checkbox"/> Пров.антиг.	Ответ	
Время р	5 — 18	Субстрат	0,4	Н.предел	0
R1 холост		Смеш. хол.реаг.		В.предел	0
Н.предел	0	Н.предел	0	Линейность	
В.предел	0	В.предел	0	Н.предел	5
				В.предел	1200
				Реакция	Нисходящий
				Втор.крив	546
				Лин. преде	15
				Объем проб	0
				Отношение	0
				Полн.назв.	ЛДГ
				№ печати	*

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Параметры | Номин.диапаз | Вычислен. | Профиль | Перенос | Внесистемные

Анализ: LDH Проба: Сыворотка Пол: Муж.

№	Пол	Возраст		Нормальн. диапазон		Ниж.предел	Верх.предел
		Лет	Месяцев	Лет	Месяцев		
<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					0	480

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры		Номин.диапаз		Вычислен.		Профиль		Перенос		Внесистемные																																																																									
Анализ	LDH							Проба	Сыворотка	Пол	Жен.																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Возраст</th> <th colspan="2">Нормальн. диапазон</th> </tr> <tr> <th>№</th> <th>Пол</th> <th>Лет</th> <th>Месяцев</th> <th>Лет</th> <th>Месяцев</th> <th>Ниж.предел</th> <th>Вер.предел</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 5</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 6</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>По умолчанию</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>0</td> <td>480</td> </tr> </tbody> </table>												Возраст						Нормальн. диапазон		№	Пол	Лет	Месяцев	Лет	Месяцев	Ниж.предел	Вер.предел	<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					0	480
Возраст						Нормальн. диапазон																																																																													
№	Пол	Лет	Месяцев	Лет	Месяцев	Ниж.предел	Вер.предел																																																																												
<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0																																																																												
<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0																																																																												
<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0																																																																												
<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0																																																																												
<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0																																																																												
<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0																																																																												
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					0	480																																																																												

Правило				Калибраторы				
Метод	Лин.(двухточ.)			Выбрано	Калибратор	№ партии	Годен до	Уровень
Коэфф.К	0	Предел ошиб. для повт. обраб.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	TruCalU	**	**	**
Экземпляры	2	Холостой ответ	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Water	000	2020-01-01	0
Интервал	0	Предел различий	0					
Чувствительность	0	SD	0					
Определение коэффициента	0							

** -вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по фактору.
Контроль по TruLab N и TruLab P.