

ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

прямой метод

Dirui CS-600B ДДС АВТО

Биохим. Параметры Позиция Профиля Расчетный/компенсационный пункт Перекрест. Контаминация Формат Отчета ИСБ Установки Другие Установки Ручной ввод позиции Настройки соединения

Параметры Анализа Параметры Калибровки Границы Параметров

Позиция Теста: HDL Полное Имя: ЛПВП Десяти. разря. 2 Единица: ммоль/л

Метод: 2-точ кон. Время Теста: 10 Точка: 16 48 0 0 Бланк Образца

Основ. Фильтр: 570 Дополн. Фильтр: 700 Фактор Анализатора(Y=aX+b) a = 1 b = 0

Объем Образца

	Сыворотка			Другие		
Нормальный:	2.4	0	0	2.4	0	0
Снижение:	2	0	0	2	0	0
Увеличение:	6	0	0	6	0	0
ОП. Предел:	3.3			3.3		
Предел Прозоны:	-3.3			-3.3		

Тип дилуента: Вода Всегда разбавлять

Полож. реакция Нижний предел

Реагент

	Объем	Разбавитель	Поз.
R1:	240	0	0
R2:	60	0	0

Время открытой бутылке (/ д) 0

Сохранить

ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

прямой метод

Dirui CS-600B ДДС АВТО

Биохим. Параметры Позиция Профиля Расчетный/компенсационный пункт Перекрест. Контаминация Формат Отчета ИСБ Установки Другие Установки Ручной ввод позиции Настройки соединения

Параметры Анализа Параметры Калибровки Границы Параметров

Позиция Теста: HDL

Проверить диапазон коэф. К

Методы Калибровки: 2-точ линейность Точка: 2 Наклон: 2

Проверка Дискретности: 3.3 ОП.

Проверка Чувствительности: 0

Горизонтальная Проверка Бланка: -3.3 - 3.3

СТД

(1)	0	S1	2.4	0	0
(2)	1	S2	2.4	0	0
(3)	0	0	0	0	0
(4)	0	0	0	0	0
(5)	0	0	0	0	0
(6)	0	0	0	0	0

Автокалибровка

	Задержка
Пустая калибровка:	0 Час
Диап. калибровка	0 Час
2-точ калибровка	0 Час
Многоточная калибровка	0 Час

Сохранить

ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

прямой метод

Dirui CS-600B ДДС АВТО

Биохим. Параметры Позиция Профиля Расчетный/компенсационный пункт Перекрест. Контаминация Формат Отчета ИСБ Установки Другие Установки Ручной ввод позиции Настройки соединен

Параметры Анализа Параметры Калибровки Границы Параметров

Позиция Теста:

HDL

Сыворотка

	н-ное значен	кон.знач.	Единица	лзк. знач.(муж)	ыс.знач. (муж)	зк. знач.(жен)	ыс. знач. (жен)
1▶	0	100	Год	0.9	4.7	1	4.7

Зна. по умолч. -

Границы Линейности: -

Значение Паники: -

Другие

	н-ное значен	кон.знач.	Единица	лзк. знач.(муж)	ыс.знач. (муж)	зк. знач.(жен)	ыс. знач. (жен)
▶							

Зна. по умолч. -

Границы Линейности: -

Значение Паники: -

Тип калибровки: линейная (калибратор из набора или TruCal HDL/LDL). Контроль по TruLab L (липидный) уровень 1 и уровень 2.