


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

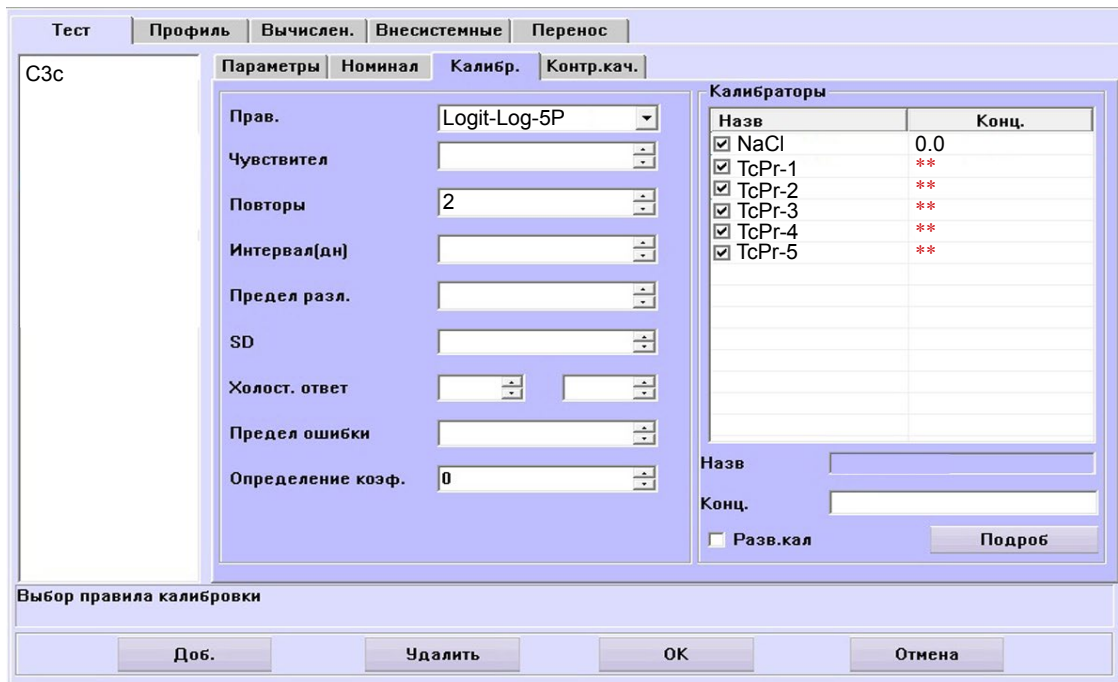

СЗс

Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.

Прав. Logit-Log-5P

Чувствител

Повторы 2

Интервал(дн)

Предел разл.

SD

Холост. ответ

Предел ошибки

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-4	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-5	**

Назв

Конц.

Разв.кал

Подроб

Выбор правила калибровки

Доб. Удалить ОК Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Логит-лог5р, (сплайн) 6 точек (набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней + вода или физраствор).
Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.