


## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

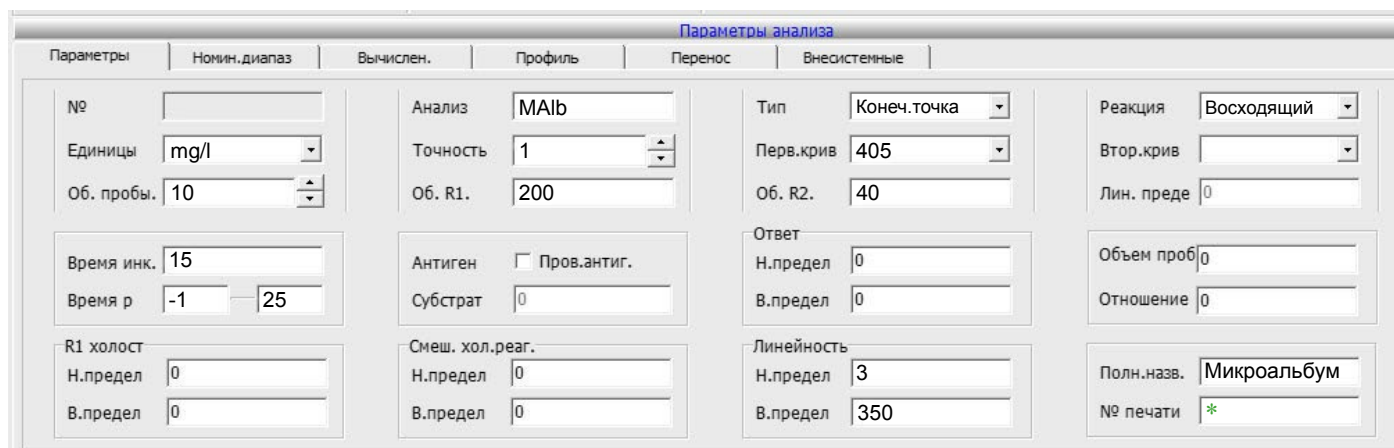


Параметры анализа

№		Анализ	MAIb	Тип	Конеч.точка	Реакция	Восходящий
Единицы	mg/l	Точность	1	Перв.крив	405	Втор.крив	
Об. пробы.	10	Об. R1.	200	Об. R2.	40	Лин. преде	0
Время инк.	15	Антиген	<input type="checkbox"/> Пров.антиг.	Ответ		Объем проб	0
Время р	-1   25	Субстрат	0	Н.предел	0	Отношение	0
R1 холост		Смеш. хол.реаг.		Линейность		Полн.назв.	Микроальбум
Н.предел	0	Н.предел	0	Н.предел	3	№ печати	*
В.предел	0	В.предел	0	В.предел	350		

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

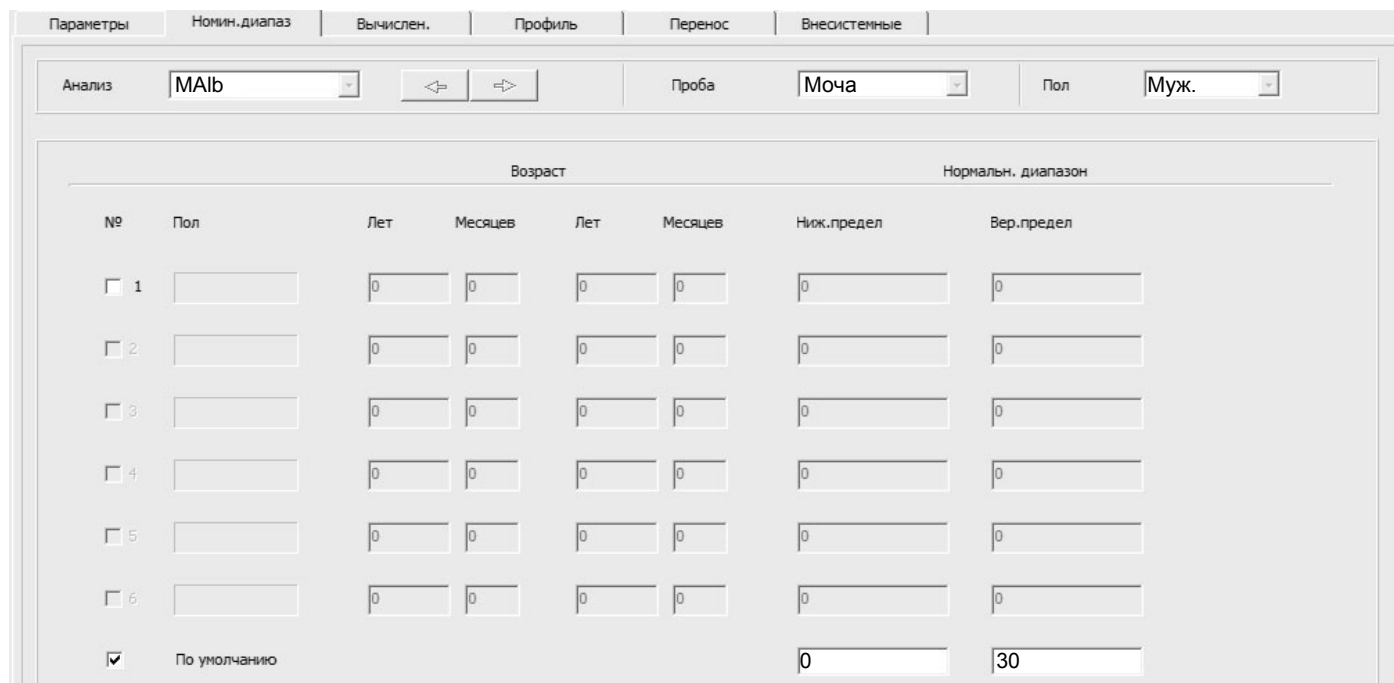

Анализ: MAIb | Проба: Моча | Пол: Муж.

№	Пол	Возраст		Нормальн. диапазон			
		Лет	Месяцев	Лет	Месяцев	Ниж.предел	Вер.предел
<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					0	30

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры		Номин.диапаз		Вычислен.		Профиль		Перенос		Внесистемные	
Анализ	MAIb							Проба	Моча	Пол	Жен.
						Возраст			Нормальн. диапазон		
№	Пол	Лет	Месяцев	Лет	Месяцев	Ниж.предел	Вер.предел				
<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0				
<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0				
<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0				
<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0				
<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0				
<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0				
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					0	30				

Правило				Калибраторы				
Метод	Logistic 5P			Выбрано	Калибратор	№ партии	Годен до	Уровень
Коэфф.К	0	Предел ошиб. для повт. обраб.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	TcAlb-5	**	**	**
Экземпляры	2	Холостой ответ	0	<input checked="" type="checkbox"/>	TcAlb-4	**	**	**
Интервал	0	Предел различий	0	<input checked="" type="checkbox"/>	TcAlb-3	**	**	**
Чувствительность	0	SD	0	<input checked="" type="checkbox"/>	TcAlb-2	**	**	**
Определение коэффициента	0			<input checked="" type="checkbox"/>	TcAlb-1	**	**	**
				<input checked="" type="checkbox"/>	NaCl_0,9%	000	2020-01-01	0
				<input type="checkbox"/> Выбор	<input checked="" type="checkbox"/> Выбрано	<input type="checkbox"/> Просрочен		

\*\* -вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Лог-лог5р или сплайн, 6 точек (набор стандартов TruCal Alb U CSF, 5 уровней + вода (физраствор)).

Контроль по TruLab Urine уровень 1 и уровень 2.