

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120 (биреагент)

Биреагентное применение

Тест		Профиль		Вычислен.		Внесистемные		Перенос	
ЛДГ		Параметры		Номинал		Калибр.		Контр.кач.	
Тест	ЛДГ	R1	240						
№	*	R2	60						
Полн.назв	ЛДГ	Объем проб	3						
№ станд.		R1 холост							
Тип реакц	Кинетич	Смеш.хол.реак							
Перв.крив	340	Диап.линейн.	5	1200					
Втор.крив	546	Предел линейн.							
Направл.	Уменьшен	Предел субстр.	5000						
Вр.реакц	3 13	Коефф.							
Вр.инкуб.	16	<input type="checkbox"/> Проверка прозоны							
Единица	U/L	q1		q2		q3		q4	
Точн.	Целое	ПК		Пог					

Доб. Удалить ОК Отмена

Монореагентное применение

Тест		Профиль		Вычислен.		Внесистемные		Перенос	
ЛДГ1		Параметры		Номинал		Калибр.		Контр.кач.	
Тест	ЛДГ1	R1	300						
№	*	R2	0						
Полн.назв	ЛДГ	Объем проб	3						
№ станд.		R1 холост							
Тип реакц	Кинетич	Смеш.хол.реак							
Перв.крив	340	Диап.линейн.	5	1200					
Втор.крив	546	Предел линейн.							
Направл.	Уменьшен	Предел субстр.							
Вр.реакц	3 13	Коефф.							
Вр.инкуб.		<input type="checkbox"/> Проверка прозоны							
Единица	U/L	q1		q2		q3		q4	
Точн.	Целое	ПК		Пог					

Доб. Удалить ОК Отмена

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по фактору.
Контроль по TruLab N и TruLab P.

ЛДГ (лактатдегидрогеназа)

DGKC-1970



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот	0	0	480
2	Жен	Сыворот	0	0	480

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> Вода	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruCalU	**

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.