

# Лактатдегидрогеназа, ЛДГ

УФ, NADH



## Параметры для ввода в программу анализатора Beckman-Coulter AU 680

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="LDH"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		Operation: <input type="text" value="Yes"/>	
Sample Volume	<input type="text" value="1.6"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	μL
Pre-Dilution Rate	<input type="text" value="1"/>		OD Limit	<input type="text" value="0.55"/>	<input type="text" value="2.2"/>
Rgt. Volume	R1(R1-1)	<input type="text" value="160"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>
	R2(R2-1)	<input type="text" value="40"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>
Wavelength	Pri	<input type="text" value="340"/>	nm	Sec.	<input type="text" value="540"/>
Method		<input type="text" value="RATE"/>		Factor for Maker	A <input type="text" value="1"/> B <input type="text" value="0"/>
Reaction Slope		<input type="text" value="-"/>		Onboard Stability Period	<input type="text" value="999"/> Day <input type="text" value=""/> Hour
Measuring Point1	First	<input type="text" value="14"/>	Last	<input type="text" value="26"/>	
Measuring Point2	First	<input type="text" value=""/>	Last	<input type="text" value=""/>	
Linearity Limit		<input type="text" value=""/>			
Lag Time Check		<input type="text" value="NO"/>			

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="LDH"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>			
Value/Flag:	<input type="text" value=""/>	Level L:	<input type="text" value=""/>	Level H:	<input type="text" value=""/>
Specific Ranges:					
	Sex	Year	Month	Year	Month
<input type="checkbox"/>	1. M	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	2. F	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	3.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	4.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	5.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	6.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	7. No demographics			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="480"/>
<input type="checkbox"/>	8. Not within expected values			<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Unit	<input type="text" value="U/L"/>		Decimal Places	<input type="text" value="0"/>	

Parameters		Calibration Parameters			
Calibrators	Calibration Specific	STAT Table Calibration			
General	ISE				
Test Name: <input type="text" value="LDH"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		Use Serum Cal. <input type="radio"/>	
Calibration Type:	<input type="text" value="AB"/>	Formula:	<input type="text" value="Y=AX+B"/>		Counts: <input type="text" value="2"/>
<Calibrator Parameters>					
Calibrator	OD	Conc	Factor/OD range	Low	High
Point 1:	<input type="text" value="TruCal U"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="-99999"/>	<input type="text" value="99999"/>	
Point 2:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
Point 3:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
Point 4:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
Point 5:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
Point 6:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
Point 7:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
Point 8:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
Point 9:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
Point 10:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
<Point Cal. For		No. of Correction Points	<input type="text" value=""/>	Use Master Curve	<input type="checkbox"/>
Master Curve>		OD Range	Low	High	Stability
Point 1:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Reagent Blank <input type="text" value=""/> Day <input type="text" value=""/> Hour
Point 2:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Calibration <input type="text" value=""/> Day <input type="text" value=""/> Hour
MB Type Factor:	<input type="text" value=""/>	1-Point Calibration Point	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> with Conc-0	

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя.  
 Калибровка линейная, АВ (калибратор TruCal U) или по фактору -МВ  
 фактор см. инструкцию; вводится в поле MB Type Factor.  
 Контроль TruLab N и TruLab P.

\* -вводится из паспорта к калибратору