

Комплемент С4

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

Т. С4

Основ Номин Калиб Контр Инд.с Кач.ум.

Информац теста
№: *
Т: С4
П.наз: Комплемент С4
Стан№:

Объем ргг
R1: 150
R2: 30
R3:
R4:

Объем проб
Станд: 4.3
Увел.: 8.6
Умен.: 2.2

Параметры реакции
Тип р: Контрольная Напр.: Увеличен
Пер.к: 340 Хол р: 40 41
Вто.к: Вр.р.: 77 79

Настройка результат
Десят: 0.01 Уг.: 1
Бл.: g/l Отс.: 0

Критерии правил
Погл.: 0 0 Диап.: 0 0.90
Увел.: 0 Лимит:
Умен.: 0 М суб:
Проз.: Част Ант
Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0
PC: 0 ABS: 0

Добав Удал. Сохр. Отмен Импорт

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Т. С4

Основ Номин Калиб Контр Инд.с Кач.ум.

По ун По дн Пол: Пр.:

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0.10	0.40
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0.10	0.40
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Ниж: Вер:

Сохр. Отмен

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Комплемент С4

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
NaCl_0.9		0.0		
TcPr-1		**		
TcPr-2		**		
TcPr-3		**		
TcPr-4		**		
TcPr-5		**		

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Лог-лог5р, (сплайн, сплайн2) 6 точек (набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней + вода (или физраствор)).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.