

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры анализа

Параметры	Номин.диапаз	Вычислен.	Профиль	Перенос	Внесистемные
№	Единицы: У/л	Об. пробы: 27	Анализ: GLDH	Точность: 0	Об. R1: 180
Время инк.: 15	Время р: 5 — 18	R1 холост: Н.предел 0, В.предел 0	Антиген: <input type="checkbox"/> Пров.антиг.	Субстрат:	Смеш. хол.реаг.: Н.предел 0, В.предел 0
Тип: Кинетика	Перв.крив: 340	Об. R2: 45	Реакция: Нисходящий	Втор.крив: 546	Лин. преде: 15
Ответ: Н.предел 0, В.предел 0	Объем проб: 0	Отношение: 0	Полн.назв.: ГЛДГ	№ печати: *	
Линейность: Н.предел 2, В.предел 120					

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Параметры

Анализ: GLDH Проба: Сыворотка Пол: Муж.

№	Пол	Возраст		Нормальн. диапазон	
		Лет	Месяцев	Ниж.предел	Вер.предел
<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию			0	7

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры		Номин.диапаз		Вычислен.		Профиль		Перенос		Внесистемные																																																																									
Анализ	GLDH							Проба	Сыворотка	Пол	Жен.																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Возраст</th> <th colspan="2">Нормальн. диапазон</th> </tr> <tr> <th>№</th> <th>Пол</th> <th>Лет</th> <th>Месяцев</th> <th>Лет</th> <th>Месяцев</th> <th>Ниж.предел</th> <th>Вер.предел</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 5</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 6</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>По умолчанию</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>												Возраст						Нормальн. диапазон		№	Пол	Лет	Месяцев	Лет	Месяцев	Ниж.предел	Вер.предел	<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					0	5
Возраст						Нормальн. диапазон																																																																													
№	Пол	Лет	Месяцев	Лет	Месяцев	Ниж.предел	Вер.предел																																																																												
<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0																																																																												
<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0																																																																												
<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0																																																																												
<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0																																																																												
<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0																																																																												
<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0																																																																												
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					0	5																																																																												

Правило				Калибраторы				
Метод	Лин.(двухточ.)			Выбрано	Калибратор	№ партии	Годен до	Уровень
Коэфф.К	0	Предел ошиб. для повт. обраб.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	TruCalU	**	**	**
Экземпляры	2	Холостой ответ	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Water	000	2020-01-01	0
Интервал	0	Предел различий	0					
Чувствительность	0	SD	0					
Определение коэффициента	0							

** -вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по фактору.
Контроль по TruLab N и TruLab P.