

(PCT)

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-800

Опред./правка химанализов

Хим.	PCT	№ *		Тип пробы	Сыворотка
Химанализ	IT			Имя для печ	Прокальцет

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Тип реакции	Кинетический	Направление реакции	Положительный						
Перв. д/в	660	Втор. д/в							
Ед.изм.	нг/мл	Десятич	0						
Время хол.	0	Время реакции	20 29						
Об. Пробы	8.8 uL	Аспирировано		Разбавитель		Холост.проб			
Понижен.	2.5 uL					P1	105 uL	P2	35 uL
Повышенный	12 uL					P3		P4	

Диап.линейности	0	35	<input type="checkbox"/> Автоповтор				
Предел линейности			Источение субстрата				
Поглощ.хол. P1	-34000	34000	Смеш.хол.погл.	-34000 34000			
Отклик холост.	-34000	34000	Вр.после открытия		Дней		
Парн.химанализ							
<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	<input checked="" type="radio"/> Пров. скорости	<input checked="" type="radio"/> Внесение антигена					
Q1		Q2		Q3		Q4	
PC		ABS					

Нормальные величины для сыворотки (плазмы):

Мужчины: 0-35

Женщины: 0-35

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

TruCal PCT, включает калибратор с конц. 0.

Контроль по TruLab PCT уровень 1 и уровень 2.