

# Фосфолипиды

PAF, enzymatic (ферментативный метод)



## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

# Фосфолипиды

PAF, enzymatic (ферментативный метод)

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
Вода		0.0		
TruCalL		**		

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: линейная. Используется калибратор – Phospholipids standard.  
Контроль по TruLab N и TruLab P, или по TruLab L (липидный) уровень 1 и уровень 2.