

Трансферрин

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-480

Опред./правка химанализов

Хим.	Transf	№ *		Тип пробы	Сыворотка
Химанализ	IT			Имя для печ	Трансферрин

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Тип реакции	Контрольная точка	Направление реакции	Положительный		
Перв. д/в	570	Втор. д/в			
Ед.изм.	г/л	Десятич	0,01		
Время хол.	47	49	Время реакции	79	81
Об. Пробы	Стандарт	Аспирировано	Разбавитель	<input type="checkbox"/> Холост.проб	
	1,5 uL			P1	P2
Понижен.	1,5 uL	35 uL	70 uL	190 uL	38 uL
Повышенный	3 uL			P3	P4

Диап.линейности	0,03	8	<input type="checkbox"/> Автоповтор	
Предел линейности				
Поглощ.хол. P1	-34000	34000	Источение субстрата	
Отклик холост.	-34000	34000	Смеш.хол.погл.	-34000 34000
Парн.химанализ			Вр.после открытия	Дней
<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	<input checked="" type="radio"/> Пров. скорости	<input checked="" type="radio"/> Внесение антигена		
Q1	Q2	Q3	Q4	
PC	ABS			

Нормальные величины для сыворотки (плазмы):

Мужчины: 2-3,6

Женщины: 2-3,6

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 6 точек, набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней + вода (физраствор).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2 или по TruLab N и TruLab P.