

# Фосфор

Molybdate UV (УФ метод с молибдатом аммония)



## Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
★ Тест	: P	Автоповтор	: <input type="checkbox"/>		
Наим. отчёта	: Фосфор	Он-лайн калиброе	: <input type="checkbox"/>		
Ед.	: mmol/l	Cuvette Wash	: <input type="checkbox"/>		
Основная дл. волны	: 340	Вспомогат.	: 546	Всего реагентов	: 2
Тип метода	: 2POINT	Тип калибровки	: Linear	★ Реагент R1	: P R1
Нач. M1	: 21	Кон. M1	: 23	★ Реагент R2	: P R2
★ Нач. M2	: 60	★ Кон. M2	: 62		
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта	: 2	<div style="text-align: center;">Задайте он-лайн калибровку</div> <div style="text-align: center;">DOWNLOAD TEST</div> <div style="text-align: center;">UPLOAD TEST</div> <div style="text-align: center;">УСТАН. АВТОПОВТОР</div> <div style="text-align: center;">КОПИР. ТЕСТ</div> <div style="text-align: center;">ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)</div>	
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля	: 0		
Напр-ние реакции	: Увеличение	Предел погл.	: 0.0		
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны	: .		
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин.	: 0.0		
Технич. минимум	: 0.06	Технич. максимум	: 9.69		
Y=aX+b	a= 1	b= 0			

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
Тест	: P				
Тип пробы	: SERUM				
Объемы проб					
★ Норм.	: 2.2	µl	Проп. развед.	: 1	X
Увелич.	: 4.4	µl	Проп. развед.	: 1	X
Уменьш.	: 2.2	µl	Проп. развед.	: 2	X
★ Объем стандарта	: 2.2	µl			
Объемы реагентов и скор. мешалки					
★ Объем R1	: 180	µl	★ Скор. мешалки R1	: Сред.	
★ Объем R2	: 45	µl	★ Скор. мешалки R2	: Выс.	
Типы проб					
<input checked="" type="checkbox"/> SERUM					
<input type="checkbox"/> URINE					
<input type="checkbox"/> CSF					
<input type="checkbox"/> PLASMA					
<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD					
<input type="checkbox"/> OTHER					
КОПИР. ОБЪЕМЫ					
ПРОСМ. ОБЪЕМОВ					

## Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности | Объёмы теста | Контрольные интервалы

Тест : P  
 Тип пробы : SERUM  
 Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)  
 Категория : Муж

Контр. интервал		Типы проб	
	Нижн. предел	Верхн. предел	
★ Норм.	0.84	1.45	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM <input type="checkbox"/> URINE <input type="checkbox"/> CSF <input type="checkbox"/> PLASMA <input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD <input type="checkbox"/> OTHER
Экстр.	0	0	

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ  
 ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности | Объёмы теста | Контрольные интервалы

Тест : P  
 Тип пробы : SERUM  
 Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)  
 Категория : Жен

Контр. интервал		Типы проб	
	Нижн. предел	Верхн. предел	
★ Норм.	0.84	1.45	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM <input type="checkbox"/> URINE <input type="checkbox"/> CSF <input type="checkbox"/> PLASMA <input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD <input type="checkbox"/> OTHER
Экстр.	0	0	

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ  
 ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по стандарту из набора. Контроль по TruLab N и TruLab P.

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !