

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200 /200 new.


Тест		Профиль	Вычислен.	Внесистемные	Перенос
РФ					
Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.					
Тест	РФ	R1	200		
№	*	R2	40		
Полн.назв	Ревмат.фактор	Объем проб	12		
№ станд.		R1 холост			
Тип реакц	Кон.точ.	Смеш.хол.реаг			
Перв.крив	340	Диап.линейн.	0 - 500.0		
Втор.крив		Предел линейн.			
Направл.	Увеличен	Предел субстр.			
Вр.реакц	-1 - 19	Козф.			
Вр.инкуб.	16	<input type="checkbox"/> Проверка прозоны			
Единица	IU/mL	q1		q2	
Точн.	Целое	q3		q4	
		ПК		Пог	
<input type="button" value="Доб."/> <input type="button" value="Удалить"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/>					

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест		Профиль	Вычислен.	Внесистемные	Перенос
РФ					
Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.					
№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0	15.0
2	Жен	Сыворот		0	15.0
<input type="button" value="Доб."/> <input type="button" value="Удалить"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/>					
<input type="button" value="Доб."/> <input type="button" value="Удалить"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/>					

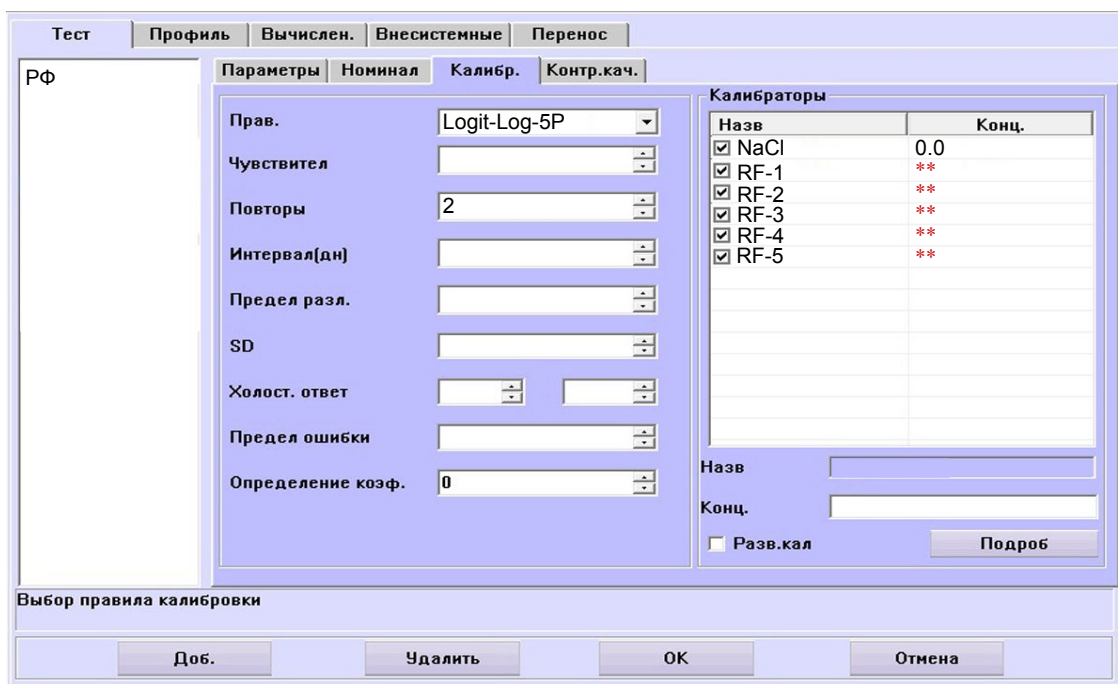

РФ

Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.

Прав. Logit-Log-5P

Чувствител

Повторы 2

Интервал(дн)

Предел разл.

SD

Холост. ответ

Предел ошибки

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> RF-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> RF-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> RF-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> RF-4	**
<input checked="" type="checkbox"/> RF-5	**

Назв

Конц.

Разв.кал

Подробнее

Выбор правила калибровки

Доб. Удалить ОК Отмена

** - вводится из паспорта к калибратор 0

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Тип калибровки: Лог-лог5р, (сплайн) 6 точек (набор стандартов TruCal RF, 5 уровней + вода (или физраствор)).
Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.