



## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

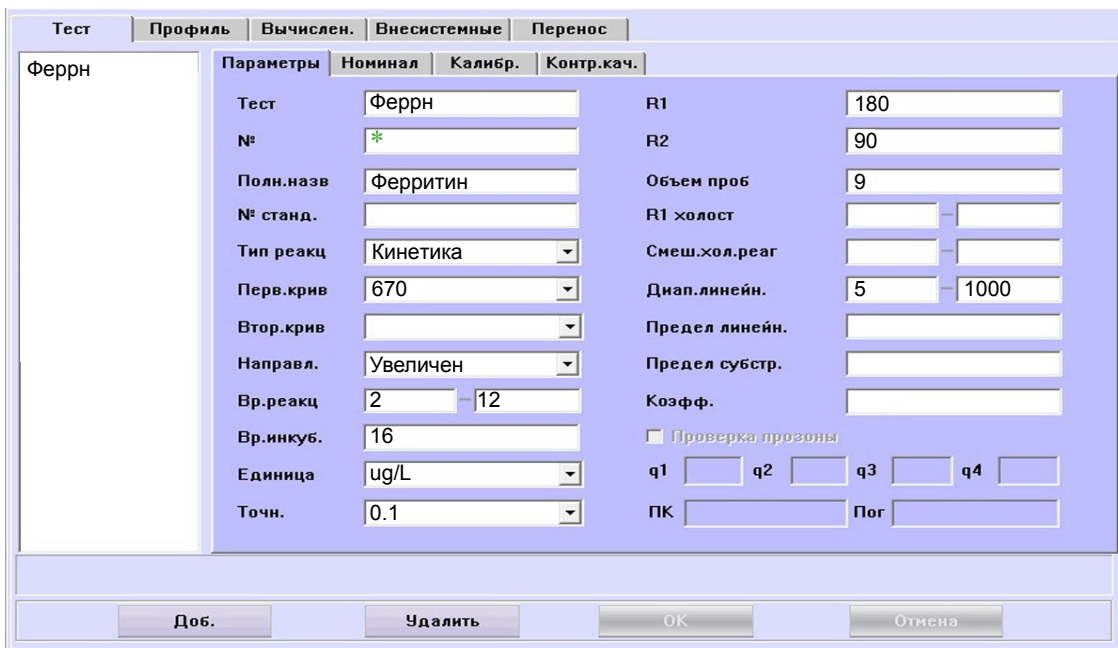

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами


Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

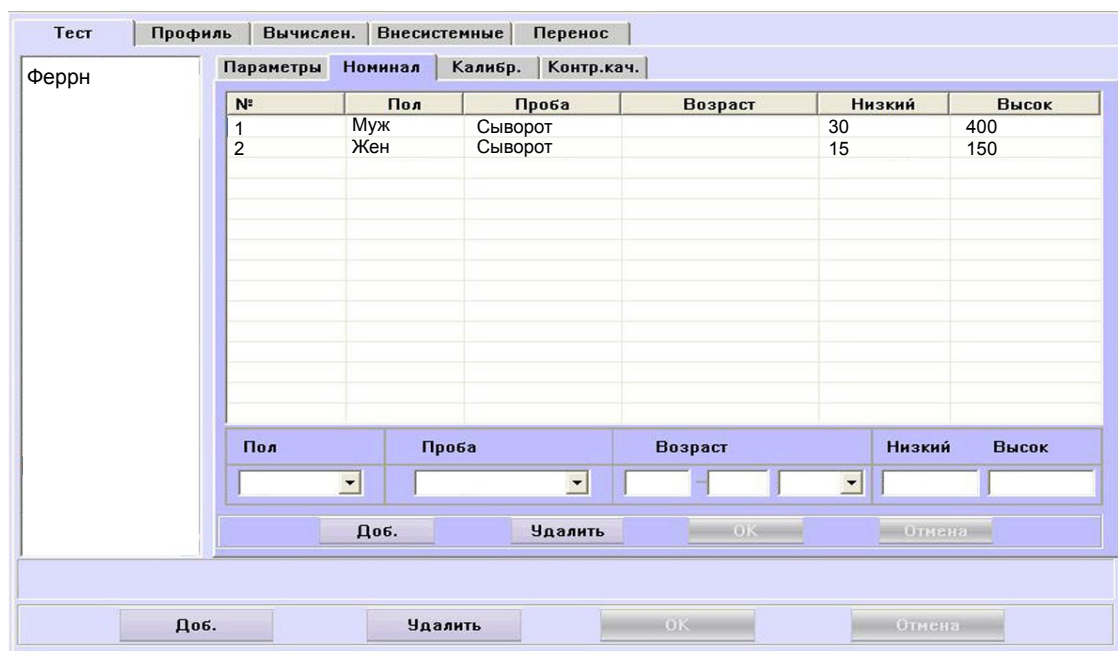

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		30	400
2	Жен	Сыворот		15	150

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

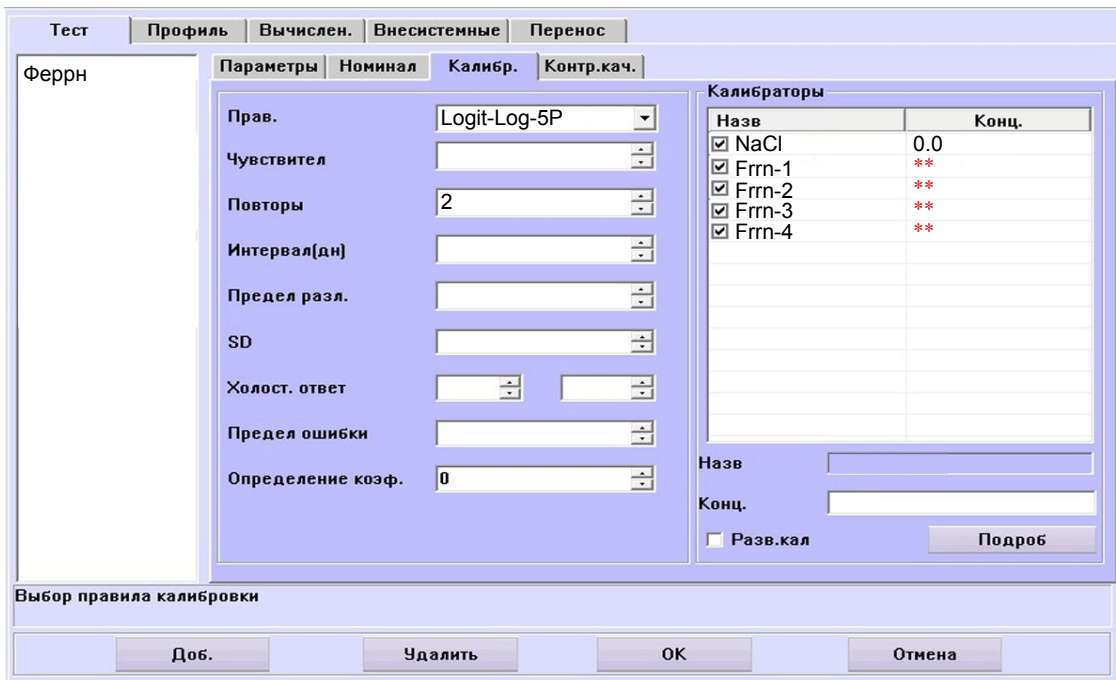

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> Frrn-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> Frrn-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> Frrn-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> Frrn-4	**

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Тип калибровки: Лог-лог5р или сплайн, 5 точек (набор стандартов TruCal Ferritin, 4 уровня + вода (физраствор)).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.