


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

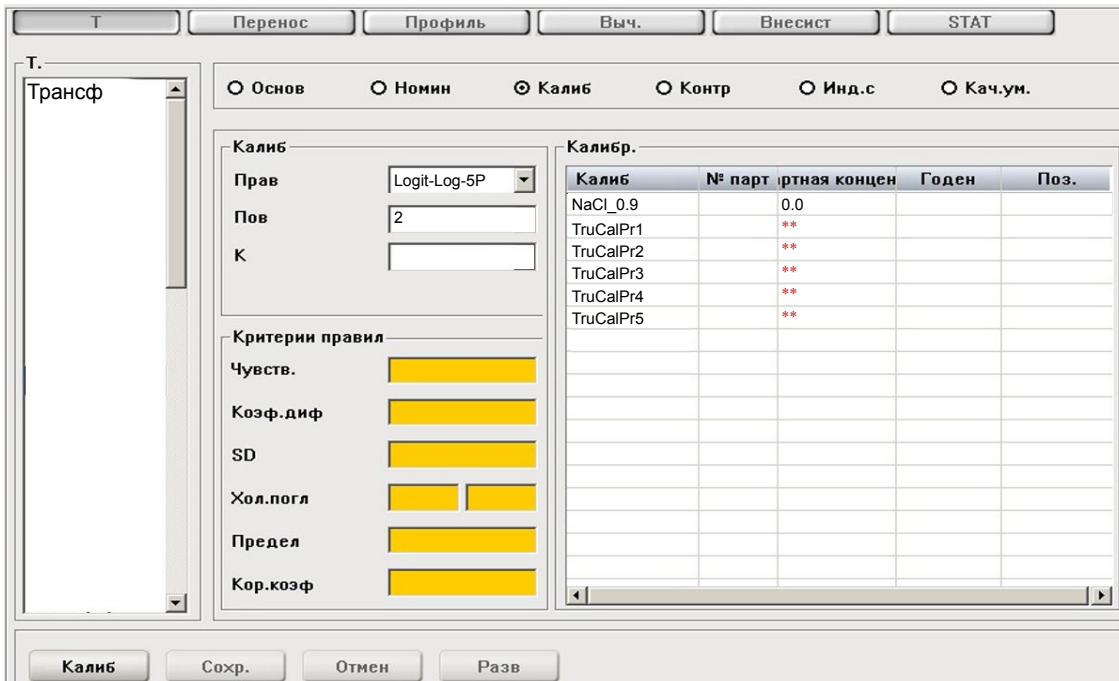

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
NaCl_0.9		0.0		
TruCalPr1		**		
TruCalPr2		**		
TruCalPr3		**		
TruCalPr4		**		
TruCalPr5		**		

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 6 точек, набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней + вода (физраствор).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2 или по TruLab N и TruLab P.