

ЛПНП (липопротеины низкой плотности)

Select (прямой селективный)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BA-88

| | | | | |
|-------------|---|--------------|---|--------|
| Стандартная | Профиль | Вычисления | Внесистемная | |
| LDL | <input checked="" type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК | | | |
| | Проверка | LDL | | |
| | Тип реакции | конечн.точка | | |
| | Пер | 578 | <input checked="" type="checkbox"/> X/п реаг. | |
| | Втор | | Направл | Ув. |
| | Задерж(с) | 10 | Об.Аспир.(мкл) | 500 |
| | Время изм.(с) | 6 | Темп | 37 |
| | Блок | ммоль/л | Десятичн. | 0,01 |
| | Полное имя | ЛПНП | | |
| | Добав. | Удал. | Сохран. | Отмена |
| | | | Возвр. | |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|--------------|------|
| Стандартная | Профиль | Вычисления | Внесистемная | |
| LDL | <input type="radio"/> Основной <input checked="" type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК | | | |
| | Эталон по умолч. | 0 | --- | 3,4 |
| | Лин.диапазон | 0,03 | --- | 10,3 |
| | АБС х/п реаг. | | --- | |
| | Пред.поглощен. | | | |
| | Лин.предел(%) | | | |
| <input type="text" value="По дифф"/> | | | | |
| Добав. | Удал. | Сохран. | Отмена | |
| | | | Возвр. | |

| | | | | |
|-------------|---|----------------|-----------------------------|--------|
| Стандартная | Профиль | Вычисления | Внесистемная | |
| LDL | <input type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input checked="" type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК | | | |
| | <input type="radio"/> Коэффиц.К | | | |
| | <input checked="" type="radio"/> Правило | 2-точ.линейная | | |
| | Повторить | 2 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> S1 | 0 | <input type="checkbox"/> S5 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> S2 | См.паспорт | <input type="checkbox"/> S6 | |
| | <input type="checkbox"/> S3 | | <input type="checkbox"/> S7 | |
| | <input type="checkbox"/> S4 | | <input type="checkbox"/> S8 | |
| | Добав. | Удал. | Сохран. | Отмена |
| | | | | Возвр. |

ВАЖНО для данного теста стоит использовать X/П образца