

# Микроальбумин

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический, для определения в моче)



## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400


\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка		
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча	0	30
Женский	Сыворотка		
Женский	Плазма		
Женский	Моча	0	30

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

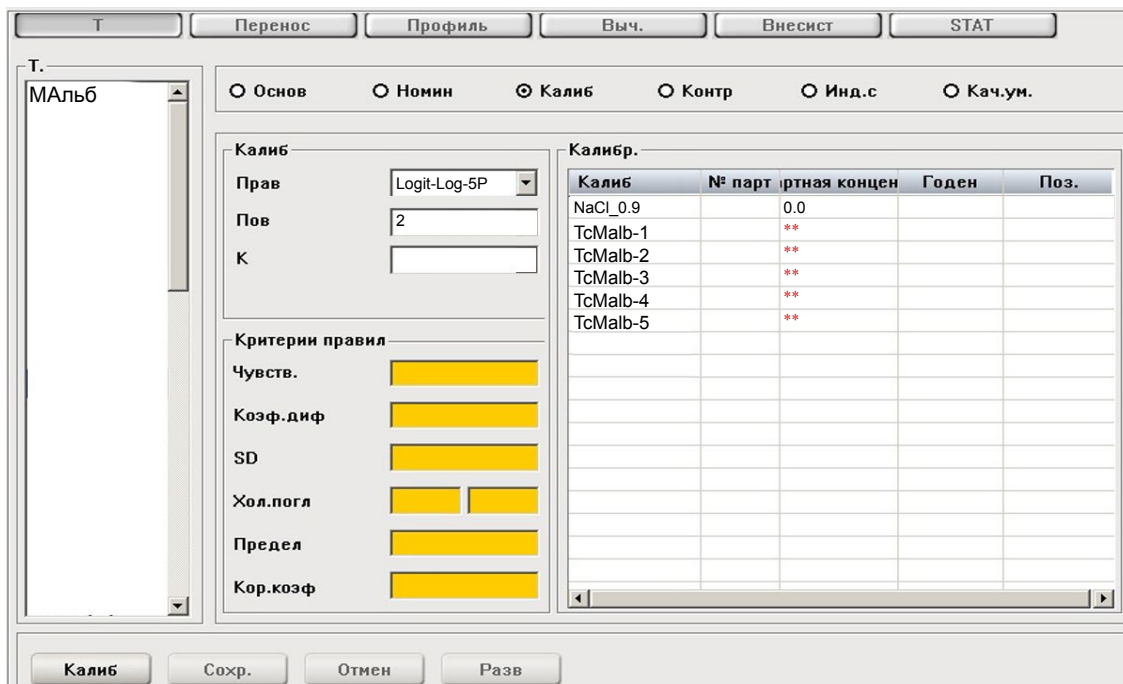

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
NaCl_0.9	0.0			
TcMalb-1	**			
TcMalb-2	**			
TcMalb-3	**			
TcMalb-4	**			
TcMalb-5	**			

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 6 точек, набор стандартов TruCal Alb U CSF, 5 уровней + вода (физраствор).

Контроль по TruLab Urine уровень 1 и уровень 2.