

Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab

Определение теста

Thermo SCIENTIFIC CЗс

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Тип теста: Фотометрический

Полное имя: СЗс-КОМПЛИМЕНТ

Сетевое имя: *

Границы: г/л

Кол-во знаков: 2

Подтверждение: Автомат.

Разведение 1 +: 0

Тип образца: Сыворотка Плазма Моча СМЖ Другие

Дата коррекции

Тест в работе: ДА

Предел теста: Мин 0 Макс 15.0 г/л

Начальн. абс: 0 3.000 А

Предел разв-я: * 5.0 г/л

Вторич раз-е 1 +: 0.0 2

Гран.норм	Мин	Макс	Ед.	В работе
Жен	0.9	1.80	г/л	ДА
Муж	0.9	1.80	г/л	ДА

Гран.норм	Мин	Макс	В работе
			ДА

Коррекция фактора: 1

Коррекция смещ.: 0 мг/дл Далее >>

F1 Новый тест F2 Сохранить F3 Отменить F4 Выбор теста F5 Калибр. парам. F6 КК парам. F7 Тест дозир. F8 --далее--

* Сетевое имя вводится в соответствии с настройками LIS/HIS. Если передача данных не требуется, поле можно оставить пустым.

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя. При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Дозировка

Thermo SCIENTIFIC CЗс

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Фон: Да

Избыток антиг.: НЕТ Кювета обычная

Дозируемый объем

Реактив	Образец	Инкубация	Кон.точка	Реактив	Инкубация	Кон.точка
Реактив: CЗсD_1 Объем (мкл): 140	Объем (мкл): 2	Время (сек.): 180	Фон: * Ответ мин. (А): 0.8	Реактив: CЗсD_2 Объем (мкл): 28	Время (сек.): 300	Длина волны (нм): 340 нм Дополн. длина:
Диспенсир. с: Экстра Объем (мкл): 10	Диспенсир. с: Экстра Объем (мкл): 8			Диспенсир. с: Экстра Объем (мкл): 8		Тип измерения: Норм.
Моющий раствор: [Нет]	Разбавл-е с: Вода Моющий раствор: [Нет]			Моющий раствор: [Нет]		

F1 F2 Сохранить F3 Отменить F4 Выбор теста F5 Тесты F6 Предварит этап F7 Стереть следующие F8

Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab

Параметры калибровки

Thermo SCIENTIFIC C3с

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Тип калибровки	Нелинейный	Фактор		Смещение																							
Повтор через (д)	0	Абс. ошибка (мА)	*	Использ. корр.	НЕТ																						
Точки/Калибр.	Двойная	Относит. ошибка (%)	*	Коррекция смещ. время повт. (дд:чч)																							
Подтверждение	Ручной	Предел абс-ции (мА)		Предел смещения (мА)																							
Направление кривой	Нарастание	Мин	*	Общее количество																							
		Макс	*	Увеличенный																							
Тип калибр.	Одиночный	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Стандарт</th> <th>Конц.</th> <th>коэф. разв.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NaCl 0.9%</td> <td>0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>TcPr-1</td> <td>**</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>TcPr-2</td> <td>**</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>TcPr-3</td> <td>**</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>TcPr-4</td> <td>**</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>TcPr-5</td> <td>**</td> <td>0.0</td> </tr> </tbody> </table>			Стандарт	Конц.	коэф. разв.	NaCl 0.9%	0	0.0	TcPr-1	**	0.0	TcPr-2	**	0.0	TcPr-3	**	0.0	TcPr-4	**	0.0	TcPr-5	**	0.0	Код смещения std	
Стандарт	Конц.	коэф. разв.																									
NaCl 0.9%	0	0.0																									
TcPr-1	**	0.0																									
TcPr-2	**	0.0																									
TcPr-3	**	0.0																									
TcPr-4	**	0.0																									
TcPr-5	**	0.0																									
Калибраторы																											
Концентрация																											
Козф. разв. 1 +																											

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Сохранить Отменить Выбор теста Тесты Калибр. КК Стандарты КК --далее--

** -вводится из паспорта к калибратору

ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак **точки** !

В данной версии адаптации в качестве разбавителя образцов используется вода. При необходимости в меню «Тест дозирование» выберите другой тип разбавителя.

* -вводится из паспорта к калибратору (TruCal Protein). Первая точка - физраствор. Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.