



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

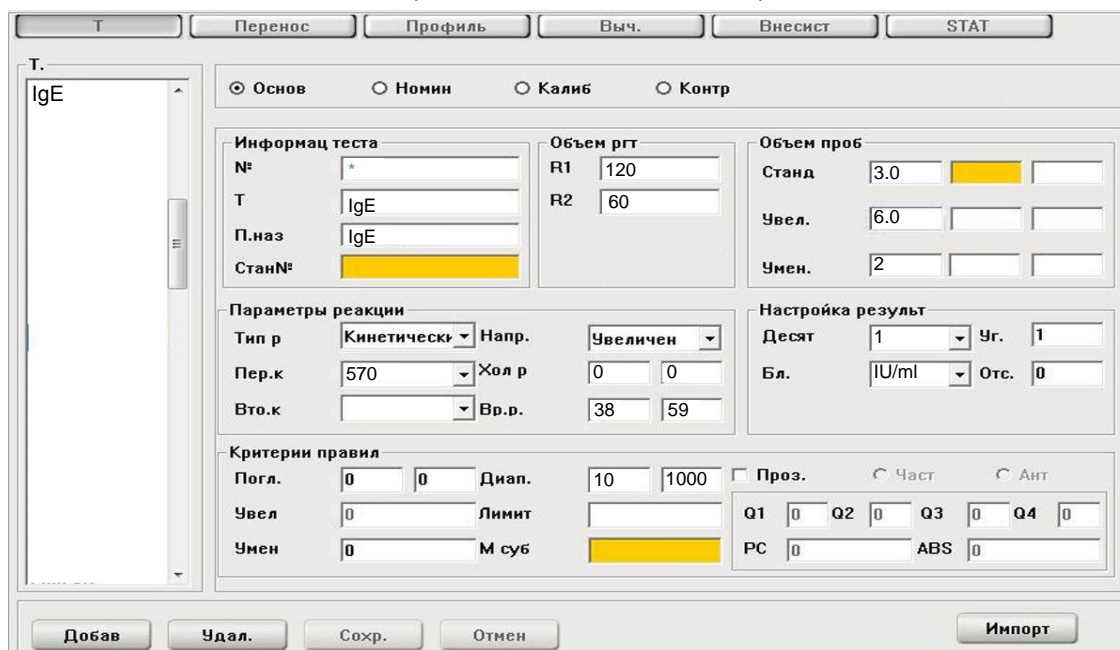

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами


Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

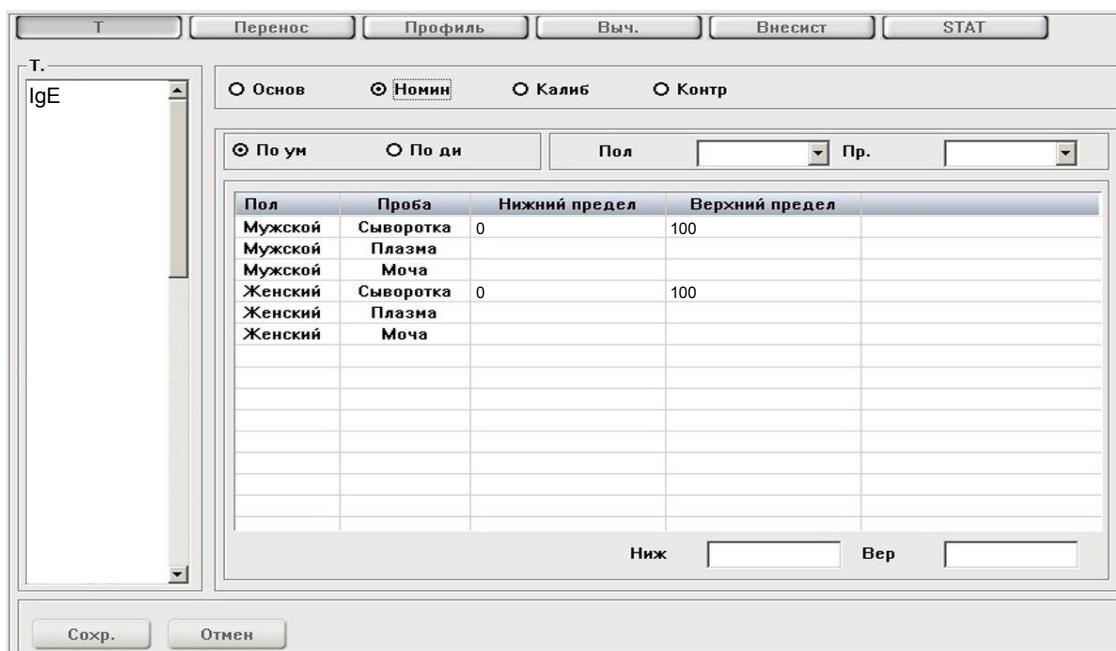

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0	100
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0	100
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

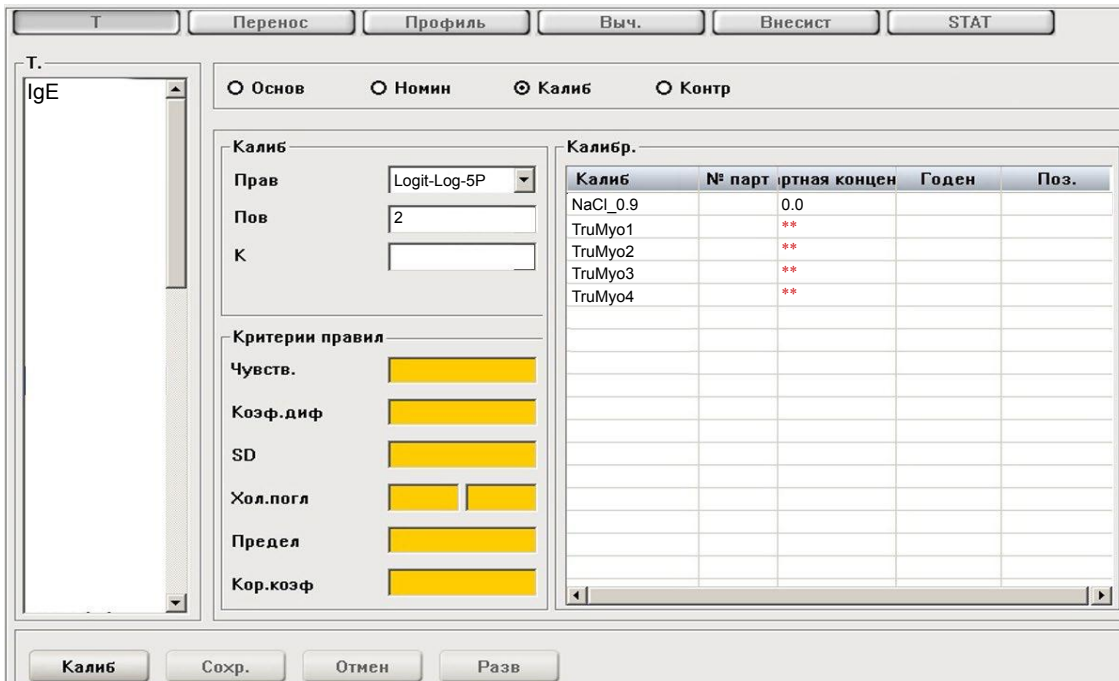

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
NaCl_0.9		0.0		
TruMyo1		**		
TruMyo2		**		
TruMyo3		**		
TruMyo4		**		

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: logit-log-5P, 6 точек, набор стандартов TruCal IgE, 5 уровней + вода (или физр-р).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2 или по TruLab N и TruLab P.