


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

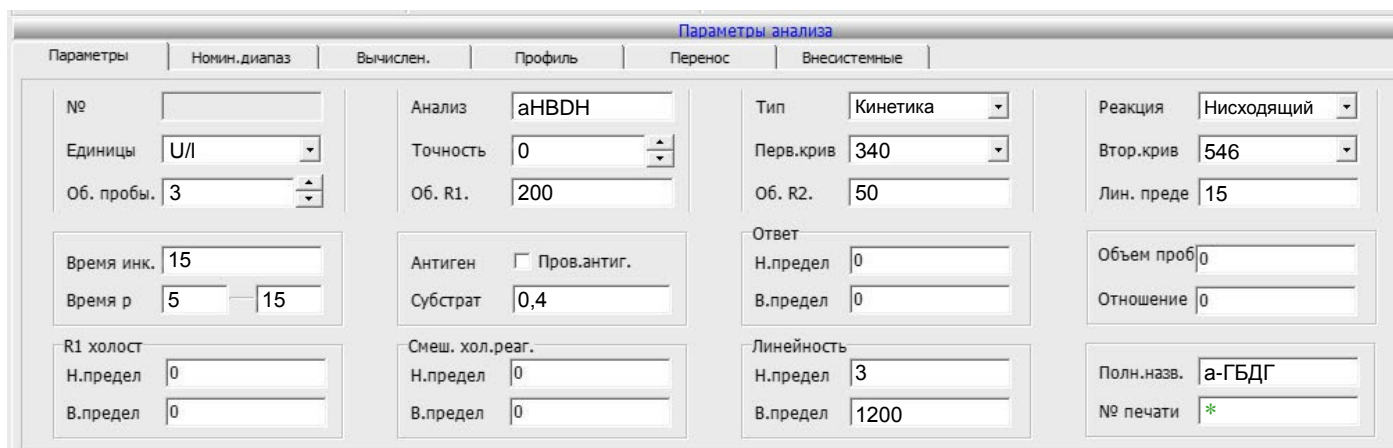

Параметры анализа

Параметры | Номин.диапаз | Вычислен. | Профиль | Перенос | Внесистемные

№

Единицы

Об. пробы.

Анализ

Точность

Об. R1.

Тип

Перв.крив

Об. R2.

Реакция

Втор.крив

Лин. преде

Время инк.

Время р —

Антиген Пров.антиг.

Субстрат

Ответ

Н.предел

В.предел

Объем проб

Отношение

R1 холост

Н.предел

В.предел

Смеш. хол.реаг.

Н.предел

В.предел

Линейность

Н.предел

В.предел


Полн.назв.

№ печати

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

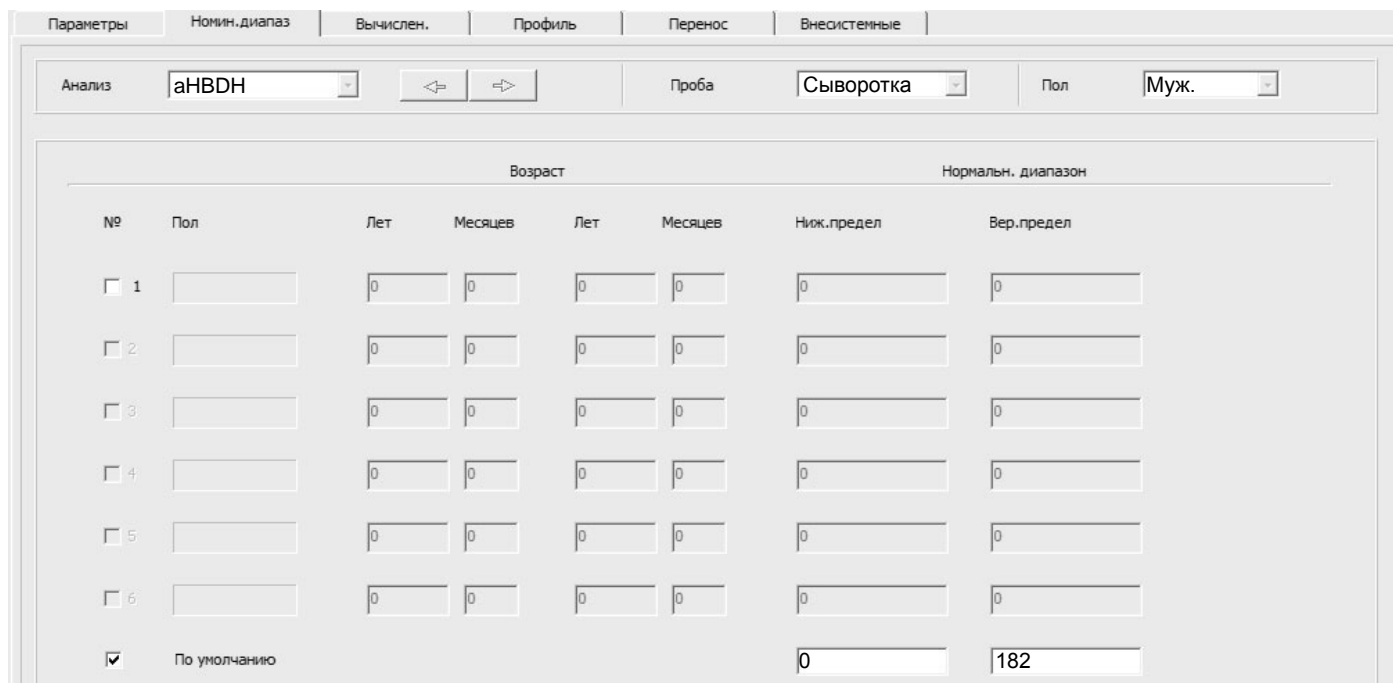

Параметры | Номин.диапаз | Вычислен. | Профиль | Перенос | Внесистемные

Анализ

← →

Проба

Пол

№	Пол	Возраст		Нормальн. диапазон		Ниж.предел	Верх.предел
		Лет	Месяцев	Лет	Месяцев		
<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 2	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 3	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 4	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 5	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 6	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="182"/>

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по фактору.
Контроль по TruLab N и TruLab P.

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры | Номин.диапаз | Вычислен. | Профиль | Перенос | Внесистемные

Анализ: Проба: Пол:

№	Пол	Возраст				Нормальн. диапазон	
		Лет	Месяцев	Лет	Месяцев	Ниж.предел	Вер.предел
<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 2	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 3	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 4	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 5	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 6	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="182"/>

Правило				Калибраторы				
Метод	<input type="text" value="Лин.(двухточ.)"/>			Выбрано	Калибратор	№ партии	Годен до	Уровень
Коефф.К	<input type="text" value="0"/>	Предел ошиб. для повт. обраб.	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TruCalU	**	**	**
Экземпляры	<input type="text" value="2"/>	Холостой ответ	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Water	000	2020-01-01	0
Интервал	<input type="text" value="0"/>	Предел различий	<input type="text" value="0"/>					
Чувствительность	<input type="text" value="0"/>	SD	<input type="text" value="0"/>					
Определение коэффициента	<input type="text" value="0"/>							

Выбор
 Выбрано
 Просрочен

** -вводится из паспорта к калибратору