

Параметры для ввода в программу анализатора Metrolab-2300



Метод	Nombre del Metodo	Марка	Ед. изм.	Тип
Na	Na	ДДС	ммоль/л	Kinetics 2

Биохимия | Внешние | Расчетные | Разработка

Параметры | Детали | Нелинейная

Длина волны (нм)	Нормальные пределы	Duracion en dias
Основная 405	Нижний Верхний	Калибровка 0
Бихромат. 550	М. 134 150	колост. проба 0
	Ж. 134 150	

Объем (мкл)	Время (сек)	Пределы метода
Образец 8	2-й реаг. 200	Нижний 110
1-й реаг. 200	Инкубация 60	Верхний 180
2-й реаг. 65	Interval 120	Измен. ОП 2

Тип калибровки	Линейная	Direction
<input type="radio"/> Линейная	Фактор *	<input checked="" type="radio"/> Increase 
<input checked="" type="radio"/> Нелинейная	Стандарт *	<input type="radio"/> Decrease 

* Данные поля можно оставить незаполненными, т.к. значения калибровок вводятся в окне «Нелинейная».

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Адаптации применимы к анализатору с кюветой бмм.

Na - натрий

Параметры для ввода в программу анализатора Metrolab-2300

Параметры | Детали

Пересчет Наклон: <input type="text" value="1"/> Смещение: <input type="text" value="0"/>	ОП реаг. Мин.: <input type="text" value="0"/> Макс.: <input type="text" value="10"/>	Пересчет фактора <input type="radio"/> Временно <input checked="" type="radio"/> Замена <input type="radio"/> Усреднение
Номенкл. код: <input type="text"/> Точность: <input type="text" value="0"/> Correlation Min.: <input type="text"/>	Сброс реагента (мкл) 1-й реаг.: <input type="text" value="10"/> 2-й реаг.: <input type="text" value="5"/>	Реагенты <input type="checkbox"/> Additional Shake <input checked="" type="checkbox"/> Integrity <input type="checkbox"/> Холост. проба <input type="checkbox"/> in cuvette
<div style="border: 1px solid gray; height: 80px; width: 100%;"></div>		Разведение 1 : <input type="text" value="1"/> <input type="checkbox"/> Спец. реагент

Параметры | Детали | Нелинейная

0

Стандарты: Искл./вкл. + -

Nº	Конц.	Абс.	Расч.	Ст.
1	0			
2	120			
3	160			
4				
5				
6				

Функция:

Печать

