

ГОМОЦИСТЕИН

РАР (ферментативный циклический метод)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	6	16
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	5	14
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Ниж: [] Вер: []

Гомоцистеин

РАР (ферментативный циклический метод)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
Hcy1		**		
Hcy2		**		

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: линейная, по двум калибраторам с ненулевыми концентрациями.
TruCal Homocysteine уровень 1 и уровень 2.
Контроль по TruLab Homocysteine Уровень 1 и уровень 2.