

ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

Итого (прямой иммуно)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-480

Опред./правка химанализов

Хим.	HDL	№ *		Тип пробы	Сыворотка
Химанализ	Immuno			Имя для печ	ЛПВП

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Тип реакции	Контрольная точка	Направление реакции	Положительный				
Перв. д/в	605	Втор. д/в	700				
Ед.изм.	ммоль/л	Десятич	0,01				
Время хол.	47 49	Время реакции	79 81				
Об. Пробы	Стандарт 1.6 uL	Аспирировано	35 uL	Разбавитель	70 uL	Холост.проб	
Понижен.	1.6 uL			P1	160 uL	P2	40 uL
Повышенный	3,5 uL			P3		P4	

Диап.линейности	0,03 4,7	<input type="checkbox"/> Автоповтор	
Предел линейности		Истощение субстрата	
Поглощ.хол. P1	-34000 34000	Смеш.хол.погл.	-34000 34000
Отклик холост.	-34000 34000	Вр.после открытия	Дней
Парн.химанализ			
<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	<input checked="" type="radio"/> Пров. скорости	<input checked="" type="radio"/> Внесение антигена	
Q1	Q2	Q3	Q4
PC	ABS		

Нормальные величины для сыворотки (плазмы):

Мужчины: 0,9-4,7

Женщины: 1,0-4,7

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тип калибровки: линейная (калибратор TruCal HDL/LDL).

Контроль по TruLab N и TruLab P, или по TruLab L (липидный) уровень 1 и уровень 2.