

Креатинин

РАР (ферментативный метод с креатининазой)



Параметры для ввода в программу анализатора Sapphire-400

Название		CreaP			
ИНФОРМАЦИЯ О ДАННЫХ					
Единицы	umol/l				
Точность	0				
Параметры анализа					
Тип	END				
Осн.ДВ	546				
Всп.ДВ	700				
Метод	РАР				
Коррекция					
Y =	Наклон	X +	СДВИГ		
	1		0		
Калибровка					
Тип	Линейный				
Стандарт					
#1	*	#4			
#2		#5			
#3		#6			
Значения норм					
	Мужчина		Женщина		
	Нижн.	Верхн.	Нижн.	Верхн.	
Сыворотка	59	104	45	84	
Моча					
Плазма					
СМЖ					
Диализ					
Другое					
Страница: 1		Печать	Далее	Сохранить	Выход

*-вводится из паспорта к калибратору

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Название		CreaP				
Методика анализа						
Тип	<input type="radio"/> 1-реар <input checked="" type="radio"/> 2-реар					
Образец	ОБЪЕМ					
Реагент 1	200	μl				
Реагент 2	100					
3-е перем..	<input checked="" type="radio"/> вык <input type="radio"/> вкл					
Бланк	<input checked="" type="radio"/> по воде					
Экран						
Точка "0"	1					
Диапазон	3					
ОБРАБОТКА ДАННЫХ						
Считывание						
	Старт	Стоп				
Осн.в.	52	54				
Дополн.	29	31				
Предел Абсорбции						
	Нижн.	0				
	Верхн.	3				
Фактор						
Корр. бланка	**					
ПРЕДЕЛ КОН. Т. 2						
ЛИНЕЙНОСТЬ(%) 0						
Авторазведение образца						
Развести	<input checked="" type="radio"/> 99:Разв.1 <input type="radio"/> 100:Разв.2					
ПРОВЕРКА ПРОЗОНЫ						
	Старт	Стоп	ПРЕДЕЛ(%)			
ПЕРВЫЙ						
ВТОРОЙ						
	<input checked="" type="radio"/> Нижн. <input type="radio"/> Верхн					
Страница: 2		Печать	Предыдущ.	Далее	Сохранить	Выход

** -поле рекомендуется оставить пустым. При сохранении фактор коррекции бланка будет рассчитан автоматически.

Креатинин

РАР (ферментативный метод с креатининазой)



Параметры для ввода в программу анализатора Sapphire-400

Название		CreaP							
Повтор с авторазведением									
<input checked="" type="radio"/> вкл <input type="radio"/> выкл									
Предел линейности методики									
<input type="radio"/> вк <input checked="" type="radio"/> вык <input type="radio"/> вкл <input checked="" type="radio"/> выкл									
		Нижн.	Верхн.						
Сыворотка	5	4000							
Моча									
Плазма									
СМЖ									
Диализ									
Другое									
Объемы флаконов для реагентного штатива (мл)									
На 24 позиции		На 36 позиций							
РЕАГЕНТ1	60	РЕАГЕНТ1	32,5						
РЕАГЕНТ2 P1	40	РЕАГЕНТ2 P1	26,25						
РЕАГЕНТ2 P2	20	РЕАГЕНТ2 P2	13						
Авторастворение по заданному пределу абсорбции									
Предел абсорбции									
		Нижн.	<input type="radio"/> вкл <input checked="" type="radio"/> выкл						
		Верхн.	<input type="radio"/> вкл <input checked="" type="radio"/> выкл						
Предел прозоны <input type="radio"/> вкл <input checked="" type="radio"/> выкл									
Предупреждающий диапазон									
		Мужчина		Женщина					
		Верхн.	Нижн.	Верхн.	Нижн.				
Сыворотка									
Моча									
Плазма									
СМЖ									
Диализ									
Другое									
Страница: 3		Печать		Предыдущ.		Сохранить		Выход	

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.

ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак **точки** !

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно