


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

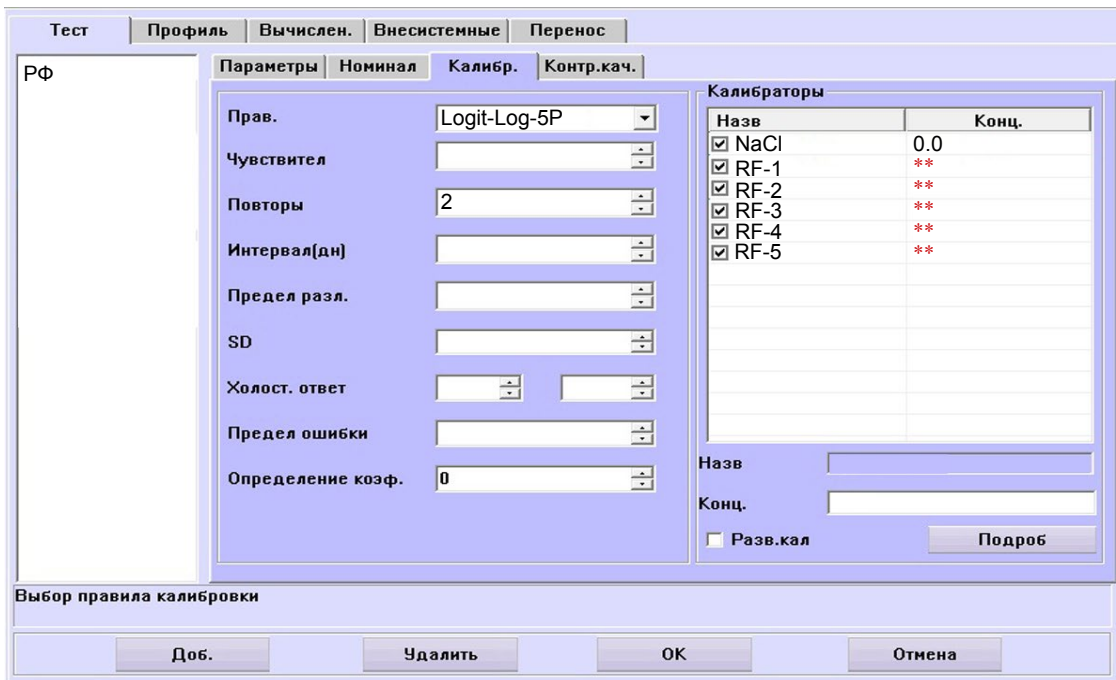

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

RF

Параметры | Номинал | Калибр. | Конц.кач.

Прав. Logit-Log-5P

Чувствител. []

Повторы 2

Интервал(дн) []

Предел разл. []

SD []

Холост. ответ [] []

Предел ошибки []

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> RF-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> RF-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> RF-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> RF-4	**
<input checked="" type="checkbox"/> RF-5	**

Назв []

Конц. []

Разв.кал

Подроб

Выбор правила калибровки

Доб. | Удалить | ОК | Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Конц.кач.» соответственно.

Тип калибровки: Лог-лог5p, (сплайн) 6 точек (набор стандартов TruCal RF, 5 уровней + вода (или физраствор)).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.