

Липопротейн (а)

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализатора Rayto SuperZ

Test Parameter Setup | Calibration Setup | Quality Control Setup | Profile Setup | Calculation Setup

Липопр-а

Название: Липопр-а | Ед.изм.: мг/дл | Точность: X.X | Нормы

Объем образца(мкл): Normal | Rerun | Образец: 5 | ☐ Предв.разведение

Реакция: Тип реакции: 2-точ.кинетика | Тип бланка: Нет | Точки измер.: 30 - 300 сек | Вычисление: Log 4P

Диапазон: Реаг.1: 200 | Скор.перемеш.: Высокая | Лин. диапазон: 3 - 110 | ☒ Реаг.2: 100 | Скор.перемеш.: Высокая | Бланк реаг.: 0 - 0

Длины волн(нм): Длина волны 1: 670 | Длина волны 2: No | Линейность: ☐ | Расход субстрата: 0 | К: 1 | В: 0

☐ По возрасту | ☐ По полу

Возраст: 3 | 16 | 35 | 60 | Свыше | Годы

Ref. Range: 0 - 30 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0

Ref. Range: 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0

Объем образца(мкл): Normal | Rerun | Объем образца при превыш.лин.: 3 | ☐ Предв.разв.

Объем образца если ниже лин.: 10

Диапазон нормальных значений указан для взрослого населения в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.