

# Бикарбонат

PEPC (метод фосфоенолпируваткарбоксилазой (ФЕПК))



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
★ Тест	: BCRB	Автоповтор	: <input type="checkbox"/>		
Наим. отчёта	: Бикарбонаты	Он-лайн калибровк	: <input type="checkbox"/>		
Ед.	: mmol/l	Знаки п/запятой	: 0		
Основная дл. волны	: 415	Вспомогат.	: 505		
Тип метода	: 2POINT	Тип калибровки	: Linear		
Нач. M1	: 14	Кон. M1	: 16		
★ Нач. M2	: 61	★ Кон. M2	: 63		
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта	: 2		
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля	: 0		
Напр-ние реакции	: Уменьшение	Предел погл.	: 0.0		
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны	: .		
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин.	: 0.0		
Технич. минимум	: 4	Технич. максимум	: 50		
Y=aX+b	a= 1	b= 0			

Задайте он-лайн калибровку

DOWNLOAD TEST

UPLOAD TEST

УСТАН. АВТОПОВТОР

КОПИР. ТЕСТ

ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
Тест	: BCRB				
Тип пробы	: SERUM				
Объемы проб				Типы проб	
★ Норм.	: 2.0	µl	Проп. развед.	: 1	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM
Увелич.	: 4.0	µl	Проп. развед.	: 1	<input type="checkbox"/> URINE
Уменьш.	: 2.0	µl	Проп. развед.	: 2	<input type="checkbox"/> CSF
★ Объем стандарта	: 2.0	µl			<input type="checkbox"/> PLASMA
Объемы реагентов и скор. мешалки				<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD	
★ Объем R1	: 200	µl	★ Скор. мешалки R1	: Выс.	<input type="checkbox"/> OTHER

КОПИР. ОБЪЕМЫ

ПРОСМ. ОБЪЕМОВ

# Бикарбонат

PEPC (метод фосфоенолпируваткарбоксилазой (ФЕПК))



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности    Объемы теста    **Контрольные интервалы**

Тест : BCRB

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	22                      29
Экстр.	0                        0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности    Объемы теста    **Контрольные интервалы**

Тест : BCRB

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	22                      29
Экстр.	0                        0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: линейная калибратор(Bicarbonate Standard).  
Контроль по TruLab Bicarbonat (один уровень).

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !