


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

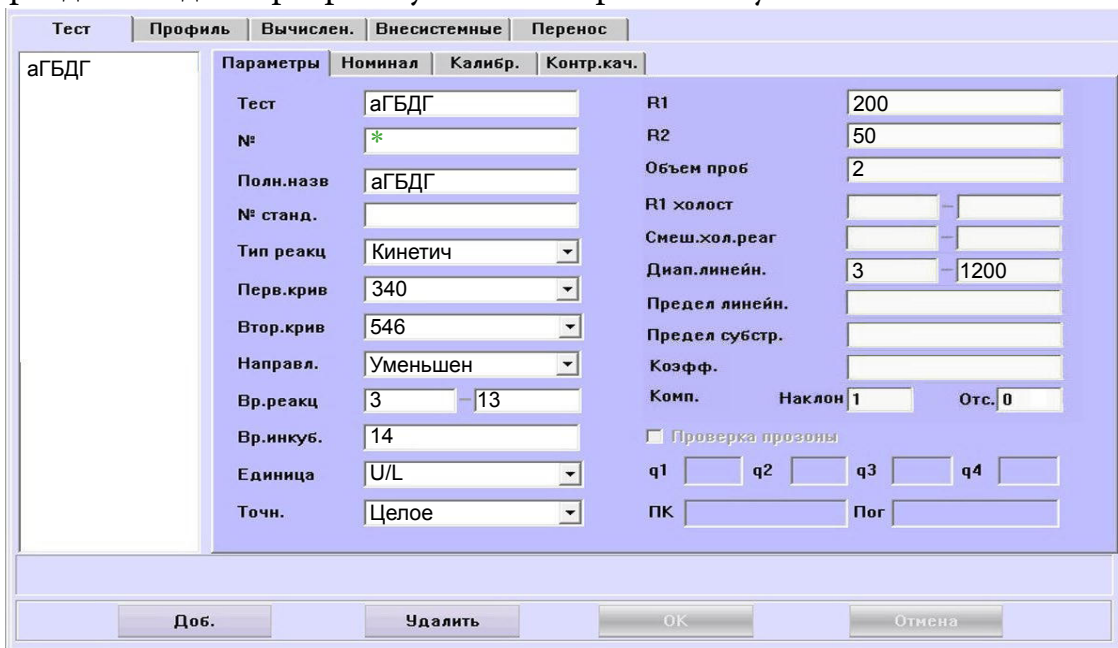

аГБДГ


Тест	аГБДГ	R1	200
№	*	R2	50
Полн.назв	аГБДГ	Объем проб	2
№ станд.		R1 холост	
Тип реакц	Кинетич	Смеш.хол.реаг	
Перв.крив	340	Диап.линейн.	3 - 1200
Втор.крив	546	Предел линейн.	
Направл.	Уменьшен	Предел субстр.	
Вр.реакц	3 - 13	Козф.	
Вр.инкуб.	14	Комп.	Наклон 1 Отс. 0
Единица	U/L	<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	
Точн.	Целое	q1	q2 q3 q4
		ПК	Пог

Доб. Удалить ОК Отмена

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

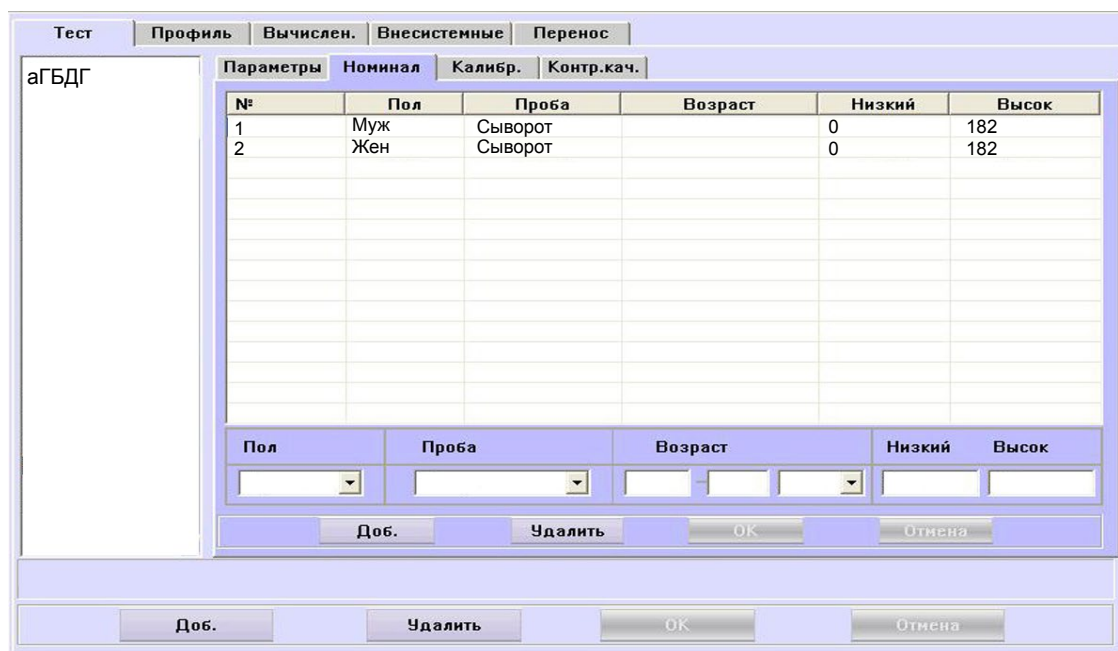

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0	182
2	Жен	Сыворот		0	182

Пол Проба Возраст Низкий Высок


Доб. Удалить ОК Отмена

Доб. Удалить ОК Отмена

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCal U) или по фактору.

Контроль по TruLab N и TruLab P.

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

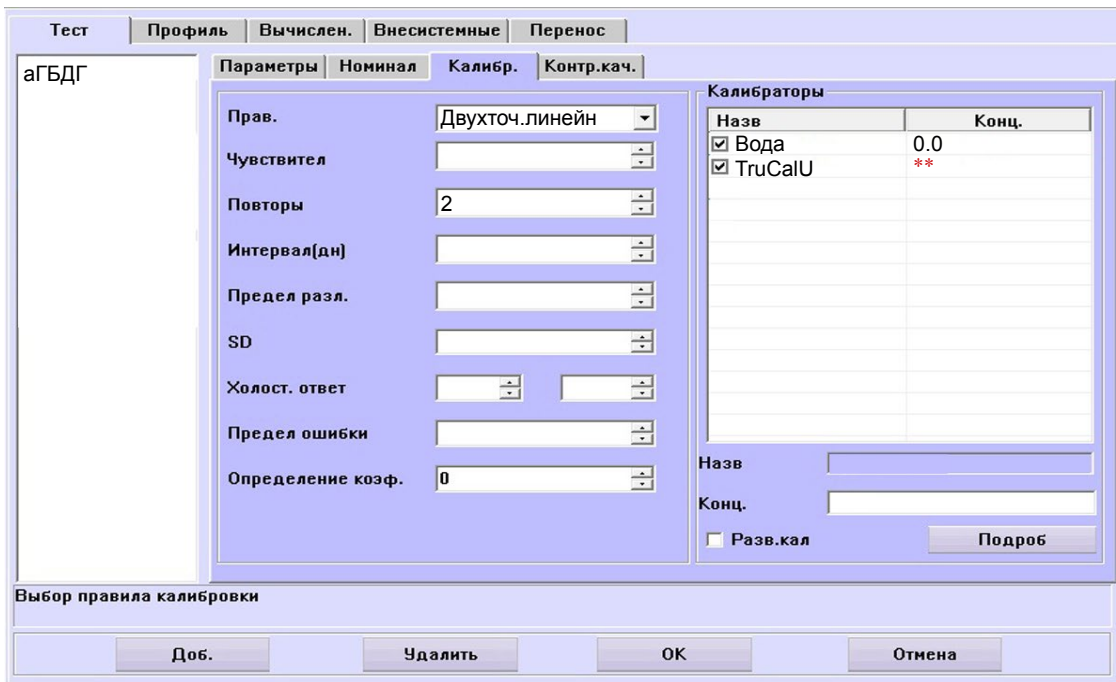

The screenshot shows the software interface for the Mindray BS-200E analyzer. The main window is titled "аГБДГ" and has several tabs: "Тест", "Профиль", "Вычислен.", "Внесистемные", and "Перенос". The "Калибр." tab is selected, showing calibration parameters. The "Параметры" sub-tab is active, displaying the following settings:

- Прав.: Двухточ.линейн
- Чувствител.: [empty]
- Повторы: 2
- Интервал(дн): [empty]
- Предел разл.: [empty]
- SD: [empty]
- Холост. ответ: [empty]
- Предел ошибки: [empty]
- Определение коэф.: 0

On the right, the "Калибраторы" section contains a table:

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> Вода	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruCalU	**

Below the table, there are input fields for "Назв" and "Конц.", a checkbox for "Разв.кал", and a "Подроб" button. At the bottom of the window, there are buttons for "Доб.", "Удалить", "OK", and "Отмена".

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.