


## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200 /200 new.

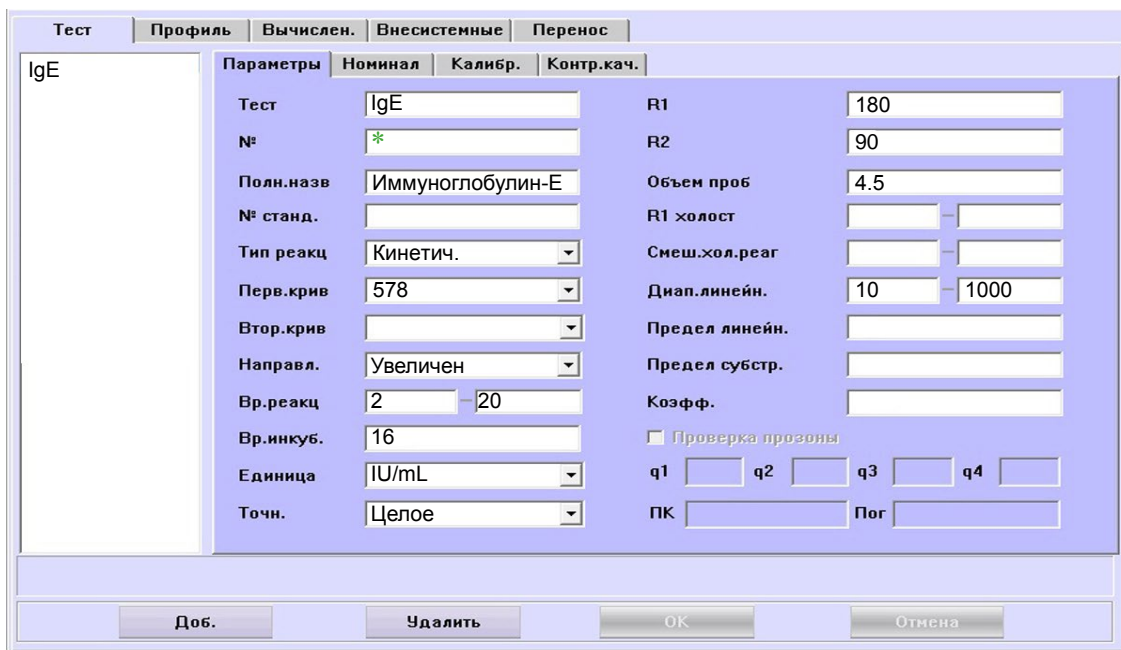


The screenshot shows a software window for configuring test parameters. The main tab is 'Тест', and the sub-tab is 'Параметры'. The test name is 'IgE'. The configuration includes fields for 'R1' (180), 'R2' (90), 'Объем проб' (4.5), 'R1 холост', 'Смеш.хол.реаг', 'Диап.линейн.' (10-1000), 'Предел линейн.', 'Предел субстр.', 'Коефф.', 'Проверка прозоны', 'q1-q4', and 'ПК'. The unit is 'IU/mL' and the precision is 'Целое'. Buttons at the bottom include 'Доб.', 'Удалить', 'OK', and 'Отмена'.

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами


Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

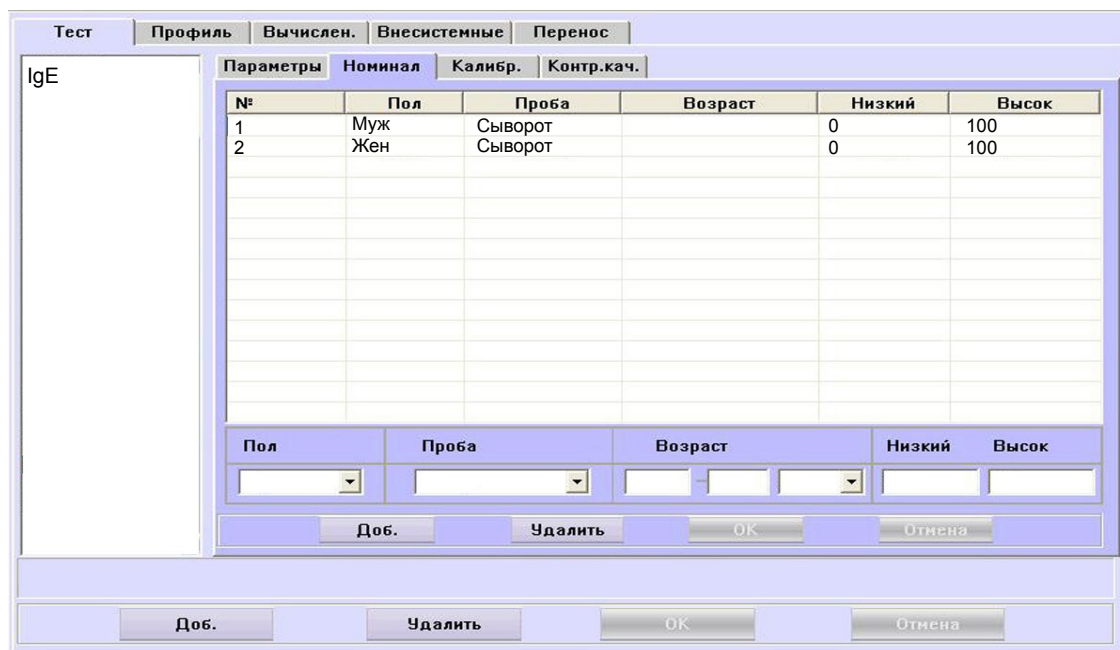

The screenshot shows a software window for configuring test results. The main tab is 'Тест', and the sub-tab is 'Параметры'. The test name is 'IgE'. Below the configuration fields is a table with columns: '№', 'Пол', 'Проба', 'Возраст', 'Низкий', and 'Высок'. The table contains two rows of data. Buttons at the bottom include 'Доб.', 'Удалить', 'OK', and 'Отмена'.

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0	100
2	Жен	Сыворот		0	100

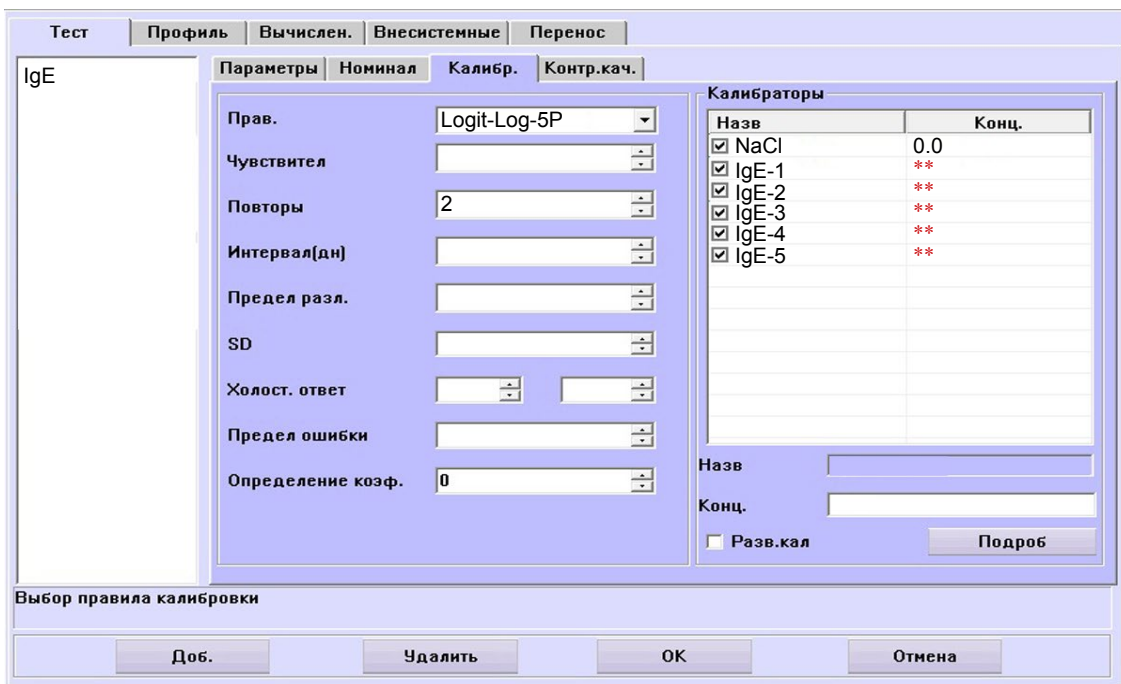

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

ИгЕ

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Прав. Logit-Log-5P

Чувствител. [ ]

Повторы 2

Интервал(дн) [ ]

Предел разл. [ ]

SD [ ]

Холост. ответ [ ] [ ]

Предел ошибки [ ]

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> IgE-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> IgE-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> IgE-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> IgE-4	**
<input checked="" type="checkbox"/> IgE-5	**

Назв [ ]

Конц. [ ]

Разв.кал

Подроб

Выбор правила калибровки

Доб. | Удалить | ОК | Отмена

\*\* - вводится из паспорта к калибратор 0

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Тип калибровки: Логит-лог5р, (сплайн) 6 точек (набор стандартов TruCal IgE, 5 уровней + вода (или физраствор)).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2 или по TruLab N и TruLab P.