

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

Т. НЖСС

Основ  Номин  Калиб  Контр

**Информация теста**  
 №: \*  
 Т: НЖСС  
 П. наз: НЖСС  
 Стан №:  

**Объем ргг**  
 R1: 160  
 R2: 40

**Объем проб**  
 Станд: 12    
 Увел.: 24  
 Умен.: 6

**Параметры реакции**  
 Тип р: Контрольная Напр.: Увеличен  
 Пер.к: 605 Хол р: 32 34  
 Вто.к: 700 Вр.р.: 58 60

**Настройка результат**  
 Десят: 0.1 Уг.: 1  
 Бл.: umol/l Отс.: 0

**Критерии правил**  
 Погл.: 0 0 Диап.: 1 135  
 Увел.: 0 Лимит:  
 Умен.: 0 М суб:

Проз.  Част  Ант  
 Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0  
 PC: 0 ABS: 0

Добав Удал. Сохр. Отмен Импорт

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Т. НЖСС

Основ  Номин  Калиб  Контр

По ум  По ди Пол: Пр.:

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	21	84
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	21	84
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Ниж: Вер:

Сохр. Отмен

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
Вода		0.0		
TruCalUIBC	**			

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).  
Контроль по TruLab N и TruLab P.