

Комплемент С4

ИттипоТD (Иммунотурбидиметрический)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Параметры	Номинал	Калибр.	Контр.кач.	
Тест	С4			
№	*			
Полн.назв	С4			
№ станд.				
Тип реакц	Кон.точ.			
Перв.крив	340			
Втор.крив				
Направл.	Увеличен			
Вр.реакц	-1	-19		
Вр.инкуб.	14			
Единица	g/L			
Точн.	0.01			
R1	150			
R2	30			
Объем проб	4.3			
R1 холост				
Смеш.хол.реак				
Диап.линейн.	0	0.90		
Предел линейн.				
Предел субстр.				
Козфф.				
Комп.	Наклон 1	Отс. 0		
<input type="checkbox"/> Проверка прозоны				
q1		q2	q3	q4
ПК		Пог		


* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0.10	0.40
2	Жен	Сыворот		0.10	0.40

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

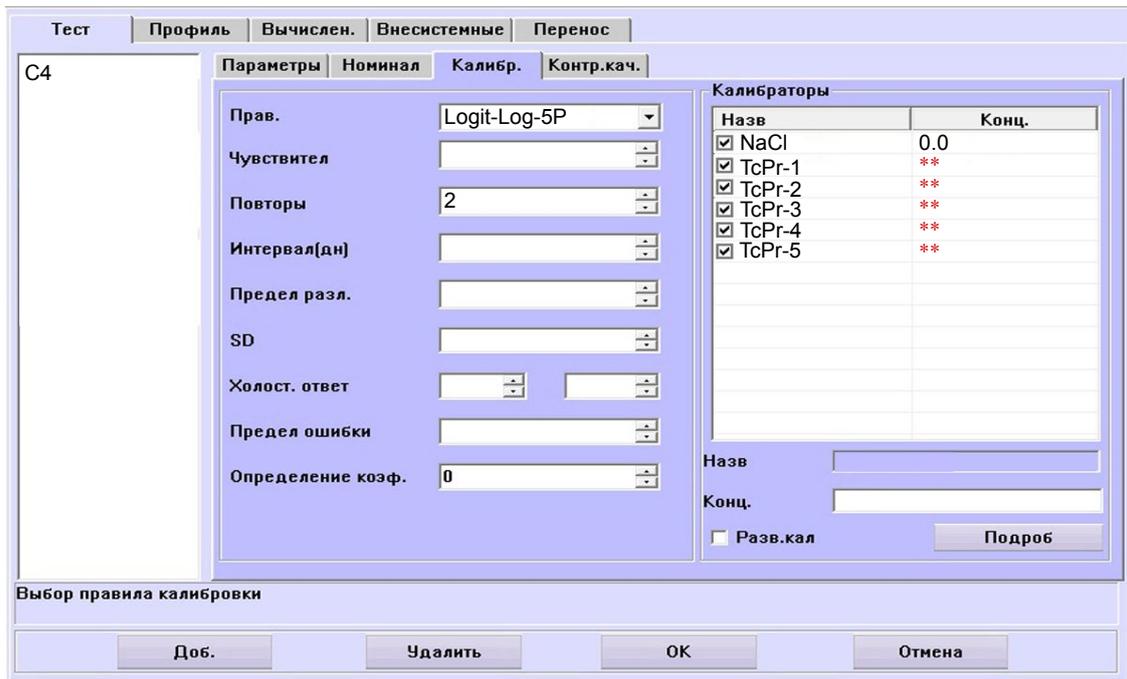

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

С4

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Прав. Logit-Log-5P

Чувствител. []

Повторы 2

Интервал(дн) []

Предел разл. []

SD []

Холост. ответ [] []

Предел ошибки []

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-4	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-5	**

Назв []

Конц. []

Разв.кал

Подроб

Выбор правила калибровки

Доб. | Удалить | ОК | Отмена

** -вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Лог-лог5p, (сплайн, сплайн2) 6 точек (набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней + вода (или физраствор)).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.