

# Аполипопротеин А1

ИтипоTD (Иммунотурбидиметрический)



## Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
★ Тест	: APOA	Автоповтор	: <input type="checkbox"/>	Он-лайн калибровк	: <input type="checkbox"/>
Наим. отчёта	: Apo-A1	Cuvette Wash	: <input type="checkbox"/>	Всего реагентов	: 2
Ед.	: g/l	Знаки п/запятой	: 2	★ Реагент R1	: APOA R1
Основная дл. волны	: 570	Вспомогат.	: ----	★ Реагент R2	: APOA R2
Тип метода	: 2POINT	Тип калибровки	: 5p-logit-log		
Нач. M1	: 22	Кон. M1	: 24		
★ Нач. M2	: 60	★ Кон. M2	: 62		
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта	: 2		
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля	: 0		
Напр-ние реакции	: Увеличение	Предел погл.	: 0.0		
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны	: Нижн.		
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин.	: 0.0		
Технич. минимум	: 0	Технич. максимум	: 2.5		
Y=aX+b	a= 1	b= 0			

Задайте он-лайн калибровку

DOWNLOAD TEST

UPLOAD TEST

УСТАН. АВТОПОВТОР

КОПИР. ТЕСТ

ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
Тест	: APOA				
Тип пробы	: SERUM				
Объемы проб				Типы проб	
★ Норм.	: 2	µl	Проп. развед.	: 1	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM
Увелич.	: 5	µl	Проп. развед.	: 1	<input type="checkbox"/> URINE
Уменьш.	: 2	µl	Проп. развед.	: 4	<input type="checkbox"/> CSF
★ Объем стандарта	: 2	µl			<input type="checkbox"/> PLASMA
					<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD
					<input type="checkbox"/> OTHER
Объемы реагентов и скор. мешалки					
★ Объем R1	: 250	µl	★ Скор. мешалки R1	: Сред.	
★ Объем R2	: 50	µl	★ Скор. мешалки R2	: Выс.	

КОПИР. ОБЪЕМЫ

ПРОСМ. ОБЪЕМОВ

# Аполипопротеин А1

ИттипоТD (Иммунотурбидиметрический)



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности    Объемы теста    **Контрольные интервалы**

Тест : APOA

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	1.1                      1.7
Экстр.	0                              0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности    Объемы теста    **Контрольные интервалы**

Тест : APOA

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	1.2                      1.9
Экстр.	0                              0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: Логит-Лог-5Р или Слайн, 6 точек.  
Набор стандартов TruCal Apo A1-B (5 уровней)+ вода (или физраствор).  
Контроль по TruLab L уровень 1 и уровень 2 или TruLab N и TruLab P.  
Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !