


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

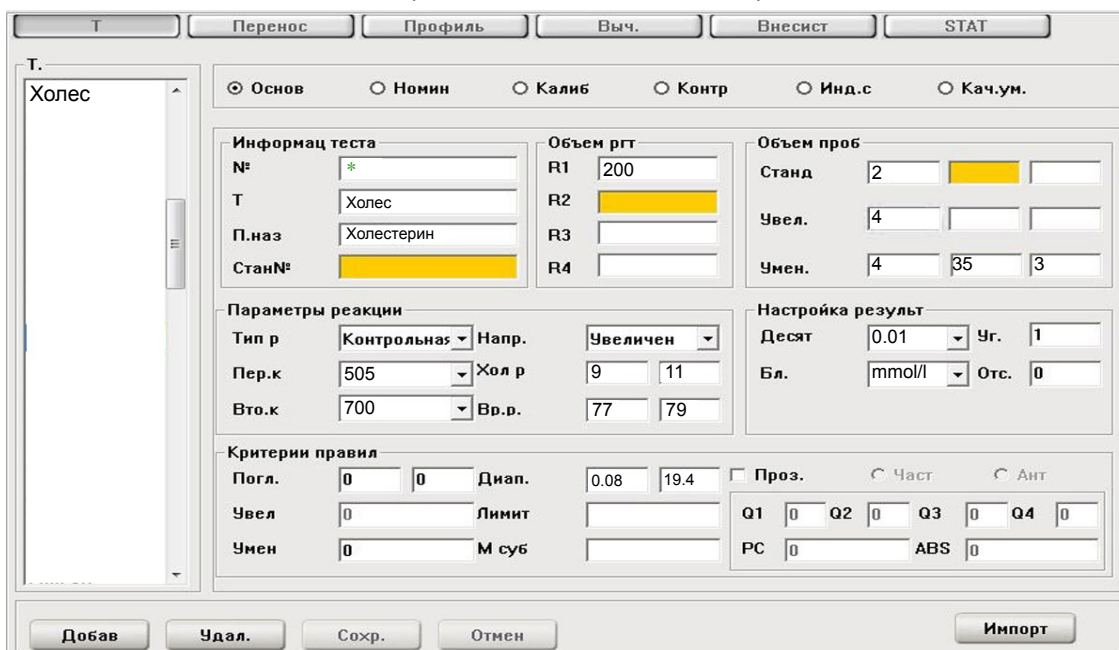

Т. Холес

Основ Номин Калиб Контр Инд.с Кач.ум.

Информация теста

№: *
 Т: Холес
 П.наз: Холестерин
 Стан№:

Объем ргг

R1: 200
 R2:
 R3:
 R4:

Объем проб

Станд: 2
 Увел.: 4
 Умен.: 4 35 3

Параметры реакции

Тип р: Контрольная Напр.: Увеличен
 Пер.к: 505 Хол р: 9 11
 Вто.к: 700 Вр.р.: 77 79

Настройка результат

Десят: 0.01 Уг.: 1
 Бл.: mmol/l Отс.: 0

Критерии правил

Погл.: 0 0 Диап.: 0.08 19.4 Проз.: Част Ант
 Увел.: 0 Лимит:
 Умен.: 0 М суб:


Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0
 PC: 0 ABS: 0

Добав Удал. Сохр. Отмен Импорт

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

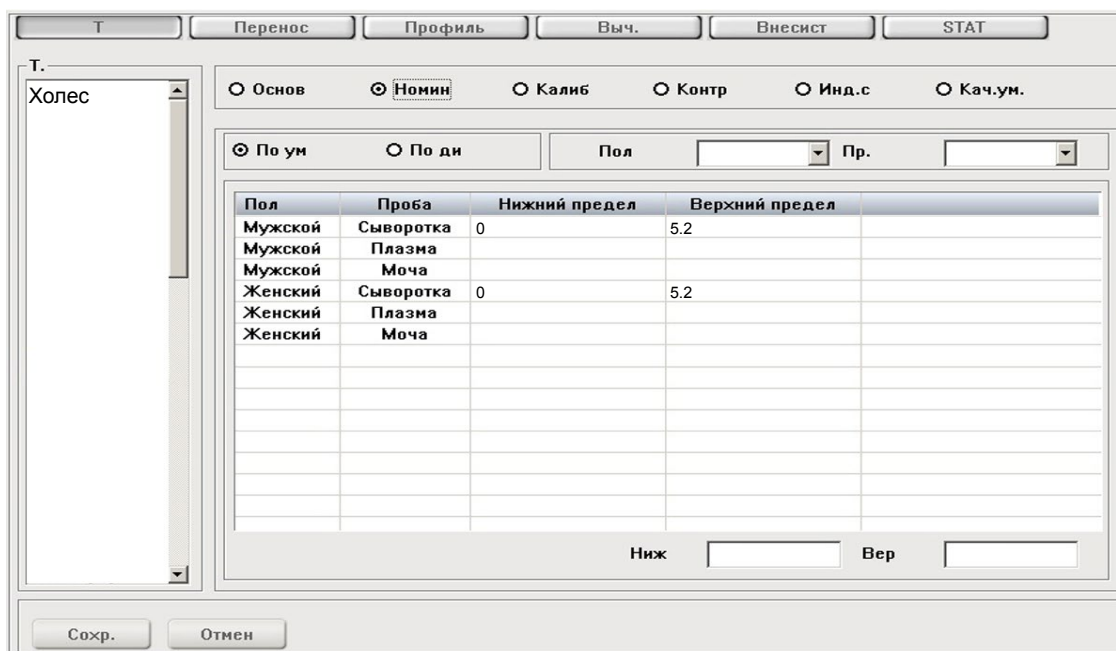

Т. Холес

Основ Номин Калиб Контр Инд.с Кач.ум.

По ум По дн Пол: Пр.:

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0	5.2
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0	5.2
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Ниж: Вер:

Сохр. Отмен

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Холестерин

GHOD-PAP (холестериноксидасный метод)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

Калиб	№ парт	ртная концен	Годеп	Поз.
Вода		0.0		
TruCalU		**		

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по стандарту из набора.
Контроль по TruLab N и TruLab P.