


## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

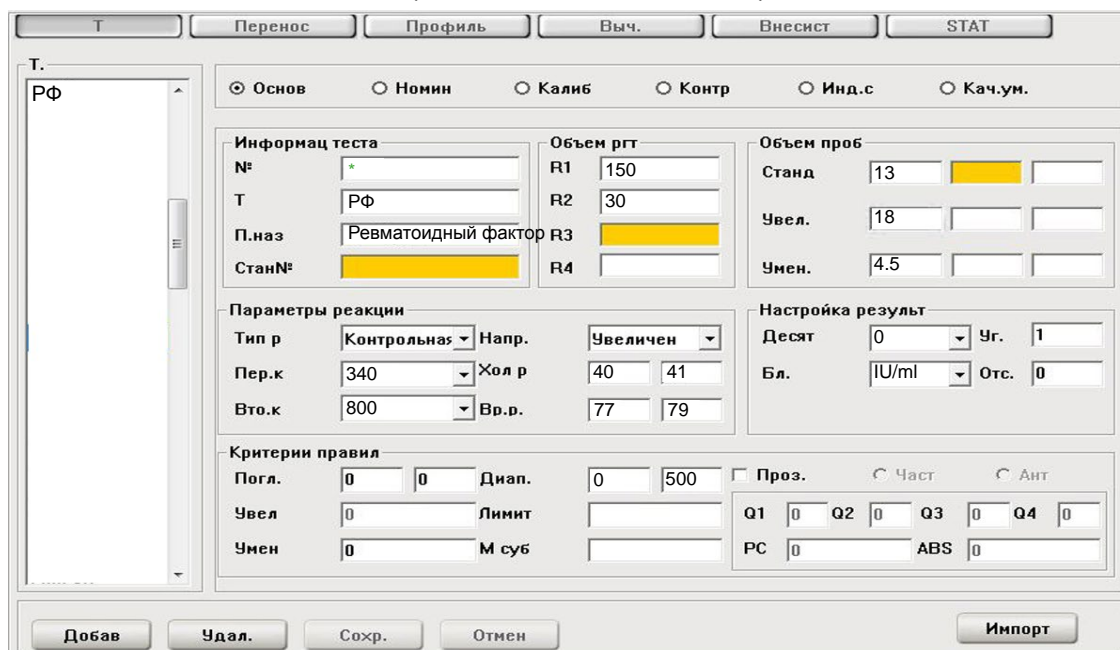

Т. РФ

Основ
  Номин
  Калиб
  Контр
  Инд.с
  Кач.ум.

**Информац теста**  
 №: \*  
 Т: РФ  
 П.наз: Ревматоидный фактор  
 Стан№:

**Объем ргг**  
 R1: 150  
 R2: 30  
 R3:  
 R4:

**Объем проб**  
 Станд: 13  
 Увел.: 18  
 Умен.: 4.5

**Параметры реакции**  
 Тип р: Контрольная Напр.: Увеличен  
 Пер.к: 340 Хол р: 40 41  
 Вто.к: 800 Вр.р.: 77 79

**Настройка результат**  
 Десят: 0 Уг.: 1  
 Бл.: IU/ml Отс.: 0

**Критерии правил**  
 Погл.: 0 0 Диап.: 0 500  
 Увел.: 0 Лимит:  
 Умен.: 0 М суб:


През.
  Част
  Ант

Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0  
 PC: 0 ABS: 0

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

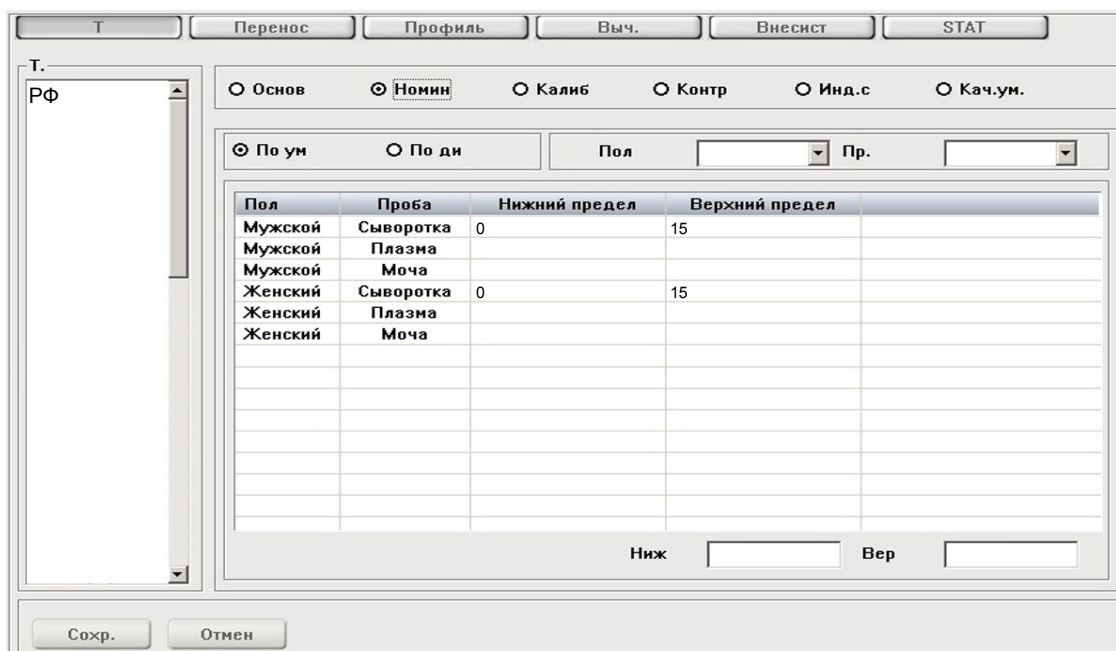

Т. РФ


Основ
  Номин
  Калиб
  Контр
  Инд.с
  Кач.ум.

По ум
  По дн
 Пол: Пр.:

| Пол     | Проба     | Нижний предел | Верхний предел |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| Мужской | Сыворотка | 0             | 15             |
| Мужской | Плазма    |               |                |
| Мужской | Моча      |               |                |
| Женский | Сыворотка | 0             | 15             |
| Женский | Плазма    |               |                |
| Женский | Моча      |               |                |

Ниж: Вер:

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

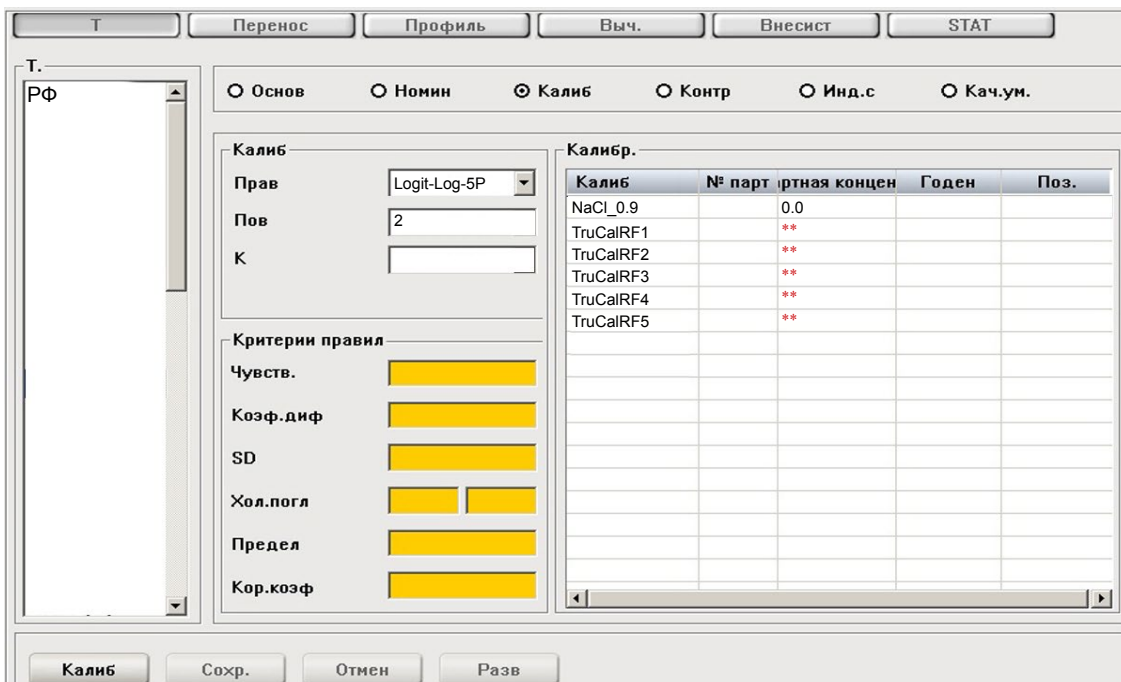

| Калиб     | № парт | ртная концен | Годеп | Поз. |
|-----------|--------|--------------|-------|------|
| NaCl_0.9  |        | 0.0          |       |      |
| TruCalRF1 |        | **           |       |      |
| TruCalRF2 |        | **           |       |      |
| TruCalRF3 |        | **           |       |      |
| TruCalRF4 |        | **           |       |      |
| TruCalRF5 |        | **           |       |      |

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 6 точек, набор стандартов TruCal RF, 5 уровней + вода (физраствор).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.