



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200 /200 new.

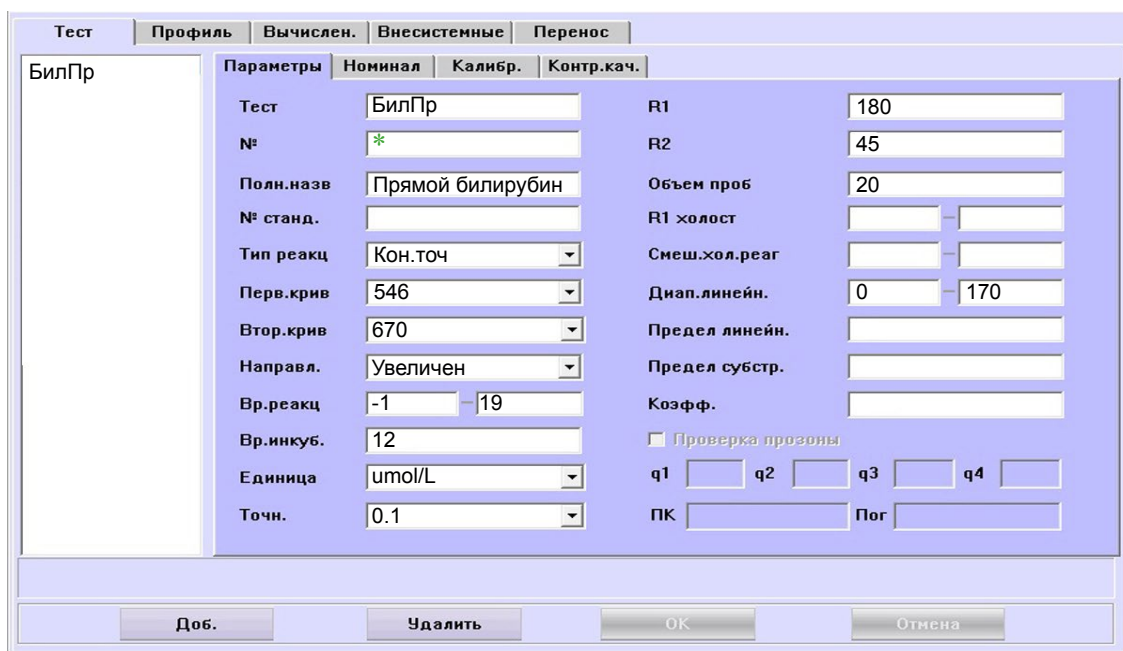

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами


Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

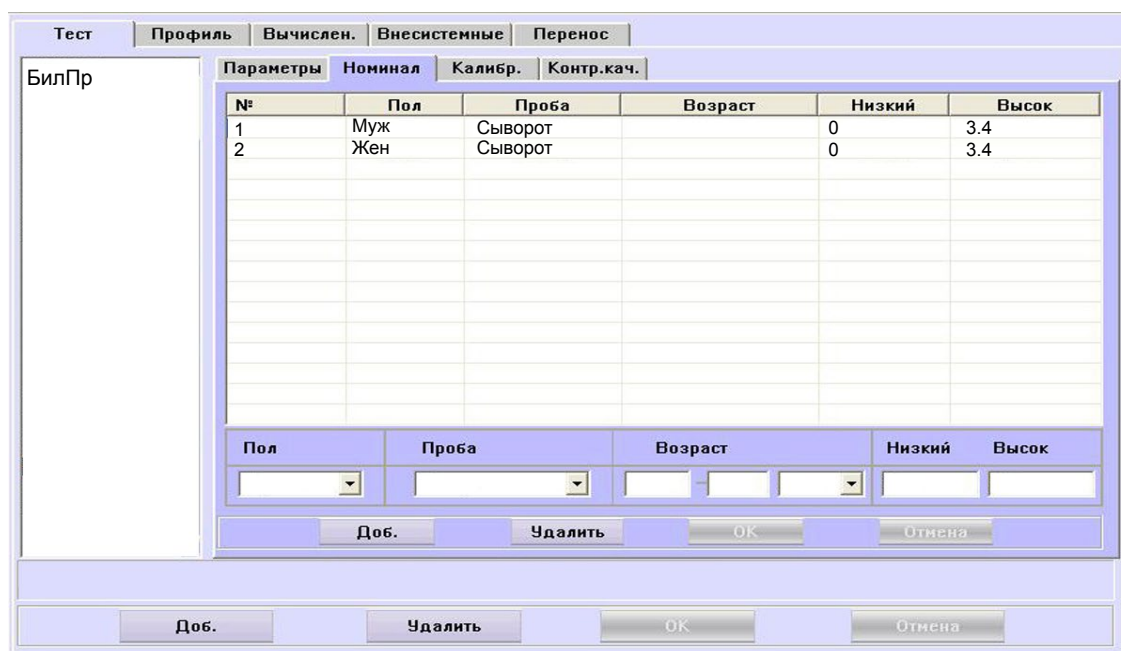

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0	3.4
2	Жен	Сыворот		0	3.4

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).
Контроль по TruLab N и TruLab P.

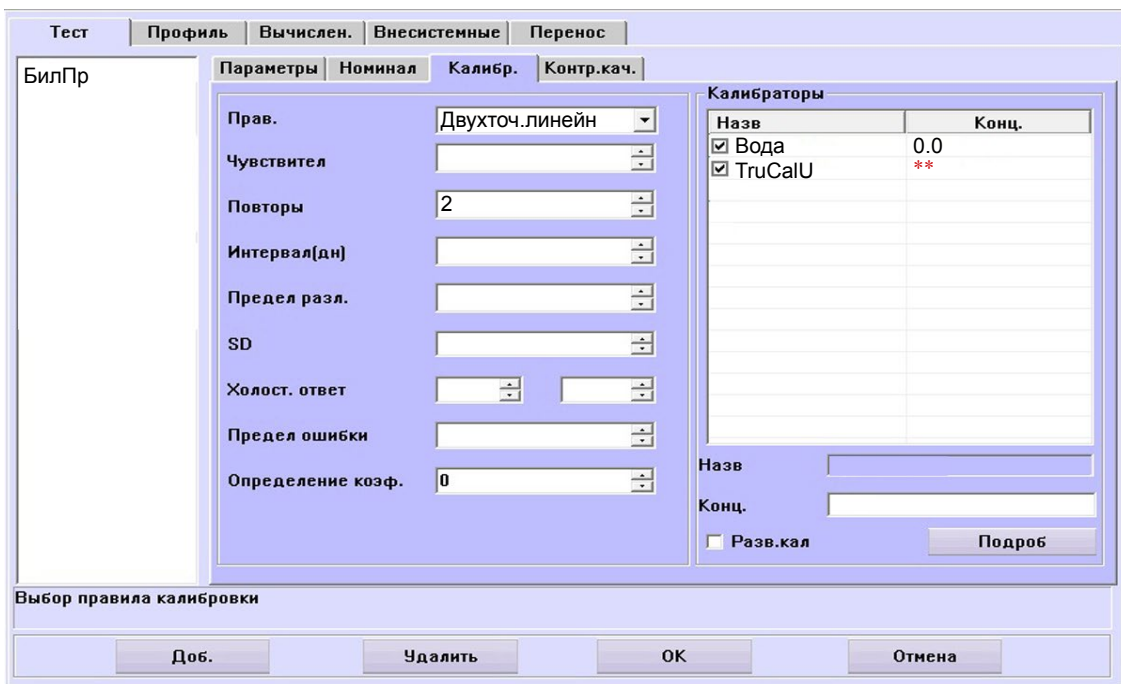

The screenshot shows a software window titled "БилПр" with several tabs: "Тест", "Профиль", "Вычислен.", "Внесистемные", and "Перенос". The "Калибр." tab is active, showing calibration parameters and a table of calibrators.

Parameters:

- Прав.: Двухточ.линейн
- Чувствител.: []
- Повторы: 2
- Интервал(дн): []
- Предел разл.: []
- SD: []
- Холост. ответ: [] []
- Предел ошибки: []
- Определение коэф.: 0

Калибраторы:

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> Вода	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruCalU	**

Назв: []
Конц.: []
 Разв.кал

Выбор правила калибровки

Доб. Удалить ОК Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.