


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200 /200 new.

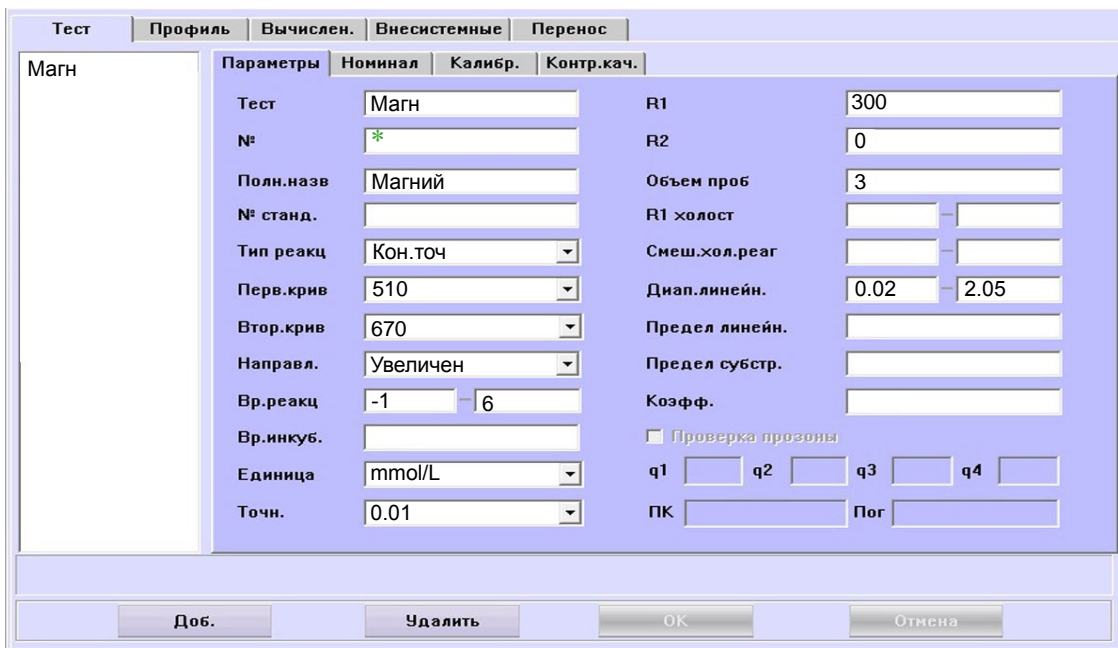


The screenshot shows a software window with a tabbed interface. The 'Тест' (Test) tab is active, and the 'Магн' (Magnesium) test is selected. The 'Параметры' (Parameters) sub-tab is selected, showing various calibration settings. The 'Номинал' (Nominal) sub-tab is also visible.

Параметры	Номинал	Калибр.	Контр.кач.
Тест	Магн		
№	*		
Полн.назв	Магний		
№ станд.			
Тип реакц	Кон.точ		
Перв.крив	510		
Втор.крив	670		
Направл.	Увеличен		
Вр.реакц	-1	6	
Вр.инкуб.			
Единица	mmol/L		
Точн.	0.01		
R1		300	
R2		0	
Объем проб		3	
R1 холост			
Смеш.хол.реаг			
Диап.линейн.	0.02	2.05	
Предел линейн.			
Предел субстр.			
Козфф.			
<input type="checkbox"/> Проверка прозоны			
q1		q2	q3 q4
ПК			Пог

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

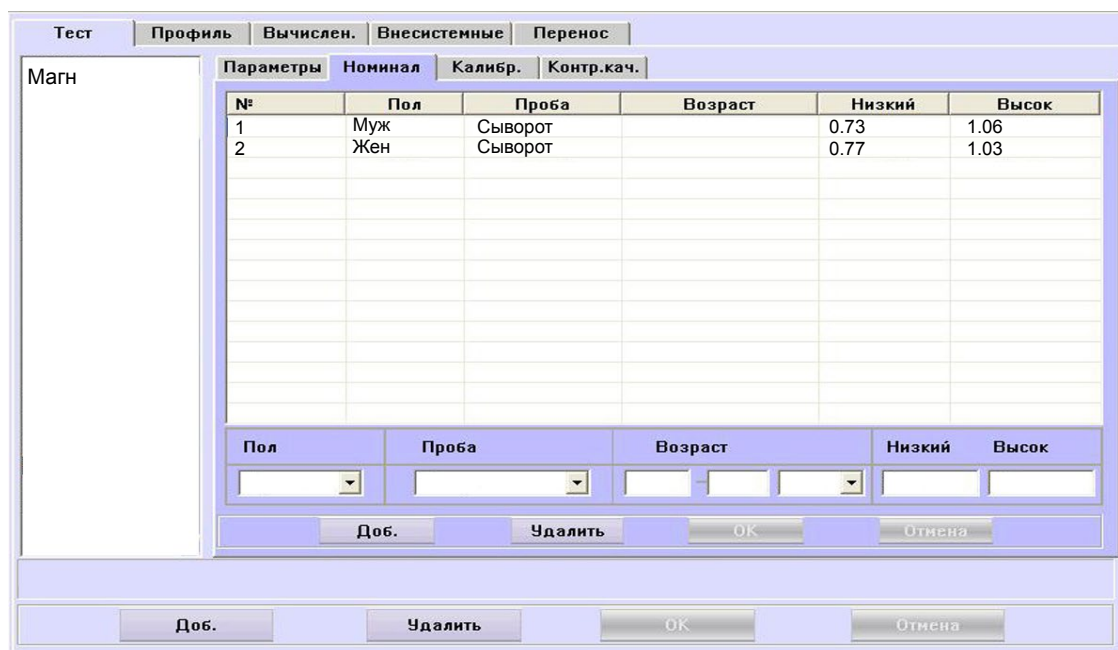


The screenshot shows the 'Калибр.' (Calibration) sub-tab of the software interface. It displays a table with columns for '№' (Number), 'Пол' (Sex), 'Проба' (Sample), 'Возраст' (Age), 'Низкий' (Low), and 'Высок' (High). Two calibration standards are listed.

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0.73	1.06
2	Жен	Сыворот		0.77	1.03

Below the table, there are input fields for 'Пол', 'Проба', 'Возраст', 'Низкий', and 'Высок'.

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).

Контроль по TruLab N и TruLab P.

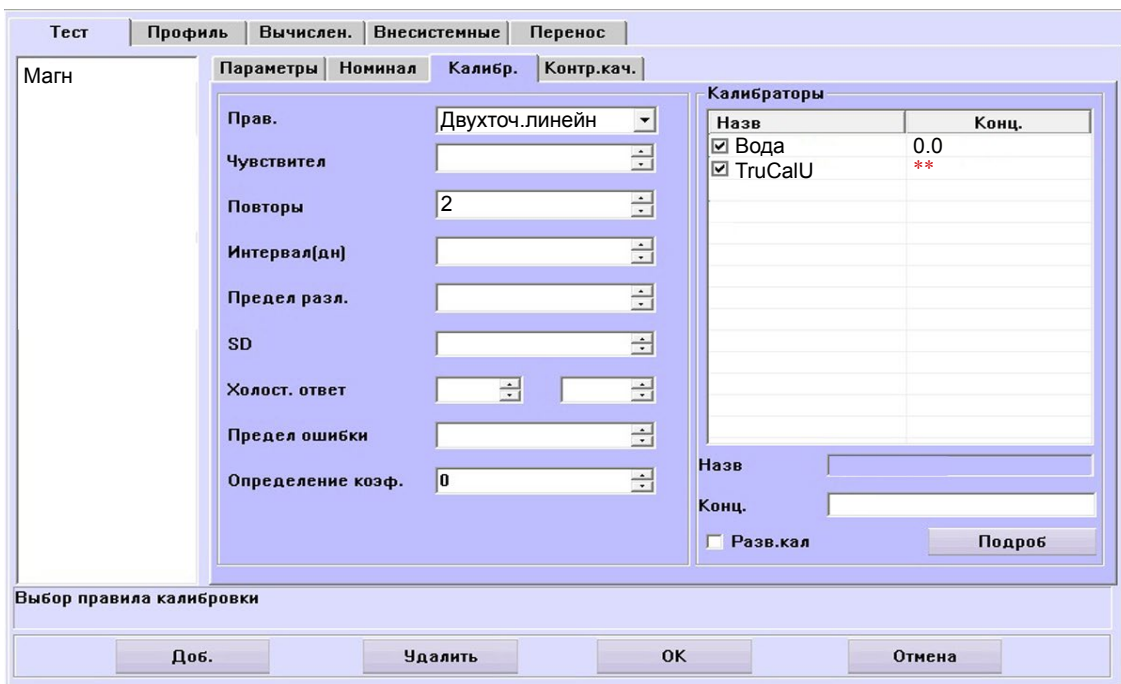

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

Магн

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Прав. Двухточ.линейн

Чувствител. []

Повторы 2

Интервал(дн) []

Предел разл. []

SD []

Холост. ответ [] []

Предел ошибки []

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> Вода	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruCalU	**

Назв []

Конц. []

Разв.кал

Подроб

Выбор правила калибровки

Доб. | Удалить | ОК | Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.